

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MEGASEPT SURFANY

Dung dịch khử khuẩn bề mặt trang thiết bị y tế

MỤC ĐÍCH: Sử dụng xịt khử khuẩn bề mặt trang thiết bị y tế.

CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG: xịt khử khuẩn bề mặt cho các trang thiết bị y tế trong bệnh viện, trạm y tế, trung tâm chăm sóc sức khỏe và phòng thí nghiệm.

THÀNH PHẦN: Didecyl dimethyl ammonium chloride 0,35 %(w/w), Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride 0,45 %(w/w).

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Dung dịch pha sẵn để sử dụng (không pha loãng).

Mang bảo hộ lao động: khẩu trang, găng tay cao su khi sử dụng chế phẩm.

Xịt trực tiếp dung dịch nguyên chất lên các bề mặt trang thiết bị y tế cần khử khuẩn bằng bình xịt mini cầm tay. Đảm bảo bề mặt cần khử khuẩn luôn ướt chế phẩm trong thời gian tối thiểu 1 phút. Thời gian cách ly: 1 phút sau khi sử dụng chế phẩm. Sau đó, lau khô bề mặt trang thiết bị y tế bằng khăn vô khuẩn.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN VÀ BẢO QUẢN

Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C.

Bảo quản trong thùng kín, ở nơi thoáng mát, tránh xa nguồn lửa và nguồn nhiệt.

Tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp và các hóa chất có tính oxy hóa mạnh.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Sản phẩm có thể gây kích ứng mắt nặng, gây đỏ và chảy nước mắt. Tiếp xúc với da có thể gây kích ứng, gây đỏ hoặc đổi màu da. Nếu hít phải lượng lớn có thể gây kích ứng đường hô hấp dẫn đến viêm phổi hóa học hoặc phù phổi. Nuốt phải có thể gây kích thích tiêu hóa dẫn đến đau bụng, nhức đầu và buồn nôn.

Trường hợp dung dịch tiếp xúc với mắt: rửa nhẹ mắt với nhiều nước sạch trong ít nhất 15 phút và tìm tư vấn bác sĩ.

Trường hợp sản phẩm tiếp xúc với da: rửa sạch da với nhiều nước sạch, lạnh và tìm giúp đỡ y tế.

Trường hợp nuốt phải dung dịch: không được gây nôn, rửa sạch miệng, uống nhiều nước hoặc sữa với từng ngụm nhỏ. Tìm tư vấn bác sĩ, mang theo tem nhãn của sản phẩm.

Nếu có triệu chứng khó thở: chuyển nạn nhân đến nơi thoáng khí. Chăm sóc y tế kịp thời.

SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH:

HẠN SỬ DỤNG: 2 năm kể từ ngày sản xuất

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Chai 1 lít.....MG222010

Can 5 lít MG222050

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

TỔNG GIÁM ĐỐC

