

Số: 14072022

Thành phố Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2022

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ TRẺ HÓA DA

1. Giới thiệu chung

- **Thiết bị trẻ hóa da (Electrosurgical Unit)** là thiết bị sử dụng nguyên lý cắt và đông tụ mô tế bào bằng cách sử dụng nhiệt tạo ra do tải trọng hoặc điện trở tiếp xúc bằng cách truyền dòng điện vào cơ thể người.

2. Mục đích sử dụng:

Thiết bị này được sử dụng trong phẫu thuật da liễu có tác dụng làm trẻ hóa làn da

3. Hướng dẫn sử dụng

Chuẩn bị trước khi sử dụng:

- Kết nối cáp nguồn và công tắc chân với các ổ cắm nằm ở phía sau của thân máy chính
- Công tắc chìa khóa và công tắc khẩn cấp trong điều kiện bình thường và phần tay đã được kết nối.
- Kết nối cáp mảnh với phần kết nối của thân máy chính
- Khi ngắt kết nối cáp, hãy nhắc các chốt giữ lại
- Kết nối điện cực với mảnh tay.
- Đặt các miếng tay trên giá đỡ

Sử dụng

- Bật công tắc phím ở mặt trước của thiết bị này
- Kiểm tra màn hình cảm ứng tải dữ liệu và màn hình hiển thị sẵn sàng hoạt động
- Sau khi hoàn tất, tắt nguồn thiết bị.

4. Chống chỉ định

- Việc sử dụng thiết bị bị hạn chế hoặc cấm đối với phụ nữ có thai, trẻ em
- Hạn chế hoặc bị cấm với người mắc các bệnh xuất huyết, các bệnh về chùng ngừa hoặc các bệnh cấp tính và những bệnh khác(những người được bác sĩ quyết định không phẫu thuật) thông qua việc cân nhắc các điều kiện


5. Cảnh báo và thận trọng

- Đảm bảo rằng nguồn điện phải được bật sau khi thiết bị được lắp đặt hoàn chỉnh ở nơi an toàn để tránh bị điện giật
- Không đặt các thiết bị khác lên khi thiết bị này đang hoạt động để giảm thiểu thiệt hại do bất kỳ hiệu ứng điện, cơ và điện từ tiềm ẩn nào gây ra



- Thiết bị phải được vận hành bởi bác sĩ có trình độ chuyên môn về da liễu và phẫu thuật
- Không vận hành thiết bị này gần hỗn hợp khí dễ cháy hoặc các vật liệu kim loại.

TP Hà Nội, Ngày 14 tháng 07 năm 2022

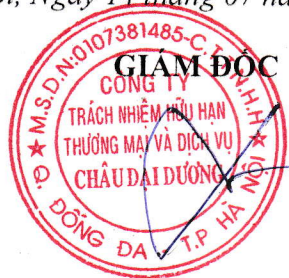

TRẦN VĂN QUẢNG

