


## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### DỤNG CỤ BẢO VỆ THÀNH VẾT MỔ DÙNG MỘT LẦN

HÃNG SẢN XUẤT: Microcure (Suzhou) Medical Technology Co., Ltd

XUẤT XỨ: Trung Quốc

#### 1. Thông số kỹ thuật

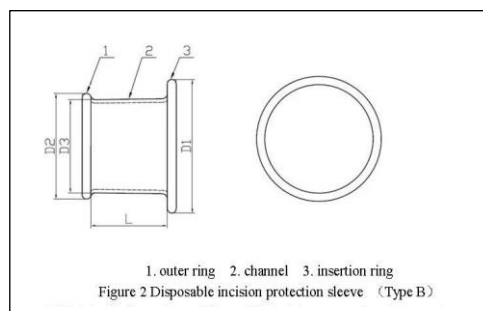

TT	Model	Đường kính D2	Đường kính D1	Đường kính D3	Chiều dài
1	WZIPS-A-50/50-50/220	50	50	50	220
2	WZIPS-A-60/70-60/220	60	70	60	220
3	WZIPS-A-60/70-60/150	60	70	60	150
4	WZIPS-A-80/90-80/150	80	90	80	150
5	WZIPS-A-120/130-120/220	120	130	120	220
6	WZIPS-A-150/160-150/220	150	160	150	220
7	WZIPS-A-180/190-180/220	180	190	180	220
8	WZIPS-A-220/230-220/250	220	230	220	250
9	WZIPS-A-250-260-250/100	250	260	250	100
10	WZIPS-290/280-270/250	290	280	270	250
11	WZIPS-320/330-320/250	320	330	320	250
12	WZIPS-B-40/30-15/20	40	30	15	20
13	WZIPS-B-50/40-25/35	50	40	25	35
14	WZIPS-B-70/70-35/25	70	70	35	25
15	WZIPS-B-70/60-45/25	70	60	45	25
16	WZIPS-B-150/70-60/5	150	70	60	5

#### 2. Chỉ định

- Sử dụng cho phẫu thuật nội soi và phẫu thuật vết mổ nhỏ, mở rộng trường vết mổ, bảo vệ vết mổ khỏi tổn thương và giảm nhiễm trùng vết mổ.

### **3. Chống chỉ định**

- Cấm sử dụng cho bệnh nhân thành bụng dày không phù hợp với quy cách của sản phẩm.
- Không được sử dụng khi vết mổ quá nhỏ và khó đặt dụng cụ.
- Không được sử dụng các dụng cụ sắc nhọn có thể gây xước, vỡ màng kênh.
- Bệnh nhân bị dị ứng với silica gel.

### **4. Hướng dẫn sử dụng**

- Rạch vết mổ theo ký hiệu đã đánh dấu
- Đầu vòng màu xanh được chèn đưa vào phễu trường qua vết rạch
- Cuộn vòng ngoài theo hướng vào trong tại 10 giờ và 2 giờ c
- Thực hiện phẫu thuật
- Kết thúc phẫu thuật: tháo vòng xanh ra khỏi phễu trường.

### **5. Cảnh báo và thận trọng**

- Sản phẩm này chỉ dành cho những người được đào tạo đầy đủ.
- Sản phẩm này được khử trùng bằng ethylene oxide, và các sản phẩm vô trùng được sử dụng để sử dụng trong lâm sàng.
- Kiểm tra gói sản phẩm này một cách cẩn thận trước khi sử dụng. Không bao giờ sử dụng nếu gói đã được mở
- Tiêu chuẩn phẫu thuật vô trùng cần được thực hiện nghiêm ngặt khi sử dụng sản phẩm này.
- Sản phẩm chỉ sử dụng một lần.
- Không được sử dụng bất kỳ sản phẩm nào đã hết hạn sử dụng.

**Người đại diện hợp pháp của cơ sở  
Giám đốc**