

Số: 14072022

Thành phố Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2022

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ LÀM MỜ SẸO

1. Giới thiệu chung

- Thiết bị làm mờ sẹo (CO2 Fractional laser) là thiết bị có chức năng cải thiện bộ vi xử lý, thân thiện với người sử dụng
- Thân máy được trang bị các ống Laser CO2, hệ thống thiết bị cầm tay phân phối và các thiết bị laser hỗ trợ. Khi nhấn lên bộ nguồn bằng chân, toàn bộ hệ thống bắt đầu hoạt động, tia laser được bắn ra.

2. Mục đích sử dụng:

- Dùng để sử dụng trong phòng phẫu thuật: điều trị làm mờ sẹo

3. Hướng dẫn sử dụng

Chuẩn bị trước khi sử dụng:

- Kết nối cáp nguồn và pedal sang các ổ cắm nằm phía sau thân chính
- Công tắc phím và công tắc khẩn cấp trong tình trạng bình thường
- Đeo kính bảo vệ cho quy trình

Sử dụng

- Bật công tắc "On" để khởi động thiết bị
- Kiểm tra màn hình cảm ứng tải dữ liệu và màn hình hiển thị sẵn sàng hoạt động
- Chọn MODE và nhấn OK để chọn chế độ sử dụng.

4. Chống chỉ định

- Việc sử dụng thiết bị bị hạn chế hoặc cấm đối với phụ nữ có thai, trẻ em
- Hạn chế hoặc bị cấm với người mắc các bệnh xuất huyết, các bệnh về chứng ngứa hoặc các bệnh cấp tính và những bệnh khác (những người được bác sĩ quyết định khụng phẫu thuật) thông qua việc cân nhắc các điều kiện

5. Cảnh báo và thận trọng

- Lắp ráp sửa chữa các chi tiết máy phải được thực hiện bởi chuyên gia/ kỹ thuật viên, việc tự ý tháo lắp có thể gây hư hỏng hoặc sự cố máy.
- Bác sĩ và bệnh nhân đều phải sử dụng kính bảo hộ trong quá trình điều trị để hạn chế rủi ro từ tia laser
- Không đặt vật dễ cháy/ các thiết bị kim loại cạnh khu vực điều trị



- Do hệ thống có chế độ tự động ngắt nên để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định có thể kết hợp sử dụng thiết bị ổn áp A.V.R
- Tiến hành thử nghiệm trên giấy hoặc kẹp gỗ trước khi thực hiện điều trị
- Kiểm tra thông số trên bảng điều khiển đảm bảo phù hợp với khu vực/ mức độ điều trị.
- Trong quá trình điều trị phải đảm bảo các ống dẫn khí được nối đúng quy cách với thân máy, trục khuỷu.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
- Sau khi phẫu thuật, tắt nguồn điện, rút dây cắm khỏi hệ thống
- Vệ sinh thiết bị trước khi bảo quản.

TP Hà Nội, Ngày 14 tháng 07 năm 2022

