



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐÈN TIỆT TRÙNG DI ĐỘNG

NHÀ SẢN XUẤT : CÔNG TY TNHH VIETNEW99

Địa chỉ kinh doanh : Số 13 ngõ 36 phố Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội

Địa chỉ sản xuất : Ngã 5 Đường Chánh,, Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam

Tên hàng : Đèn tiệt trùng di động

Chủng loại : DCT-01; DCT-02

Cấu hình

- Đèn tiệt trùng di động : 01 cái
- Bóng đèn cực tím : 01 cái

Thông số kỹ thuật

- Đèn bao gồm hệ thống khung máng,đuôi đèn và bóng tiệt khuẩn
- Thông số
- Làm bằng thép không gỉ
- Máng phản vệ để tập trung ánh sáng tia cực tím vào khử khuẩn vùng mong muốn
- Bóng cực tím UV Dài 60cm
- Nguồn điện : 1 pha 220V/50HZ
- Công suất tiêu thụ 25w

Hướng dẫn sử dụng

- Bước 1: Kiểm tra toàn bộ không gian, xung quanh phòng và đảm bảo không có người trong phòng.
- Bước 2: Mở cửa sổ và cửa chính.
- Bước 3: Bật công tắc đèn, để đèn hoạt động từ 20 – 30 phút rồi tắt.
- Bước 4: Sau đó, bạn bật quạt để thông khí trong 30 phút.
- Bước 5: Đóng cửa phòng lại.