

# TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM

## Gạc răng miệng Mipbi

### 1. THÀNH PHẦN

Mỗi gạc mềm được tẩm ẩm bởi:

Natri Chloride, Natri bicarbonat, Xylitol, Dịch chiết trà xanh, Dịch chiết cam thảo, Dịch chiết lá hẹ, Dịch chiết cúc la mã.

### 2. CÔNG DỤNG

Vệ sinh hàng ngày làm sạch nướu, lưỡi, răng, miệng cho trẻ từ sơ sinh trở lên. Tăng cường cơ chế tự bảo vệ cho lưỡi, nướu, răng, miệng giúp phòng ngừa những vấn đề về răng miệng (nấm miệng, tưa lưỡi, viêm nướu...), giúp nướu khoẻ trong thời kỳ trẻ mọc răng, giúp ngừa sâu răng.

### 3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

#### Cách dùng:

- Sản phẩm chỉ sử dụng 1 lần.
- Rửa sạch tay bằng xà phòng trước khi sử dụng.
- Cho nhẹ ngón tay vào miệng gạc.
- + Lau nhẹ nhàng lên nướu, lưỡi, răng và 2 phần bên má.
- + Sử dụng ngay sau khi mở và không sử dụng lại.
- Đối với trẻ đang mọc răng: Khi trẻ đau nhức khi mọc răng, mẹ có thể đeo gạc và xoa nhẹ nơi nướu đang sưng để giảm cảm giác khó chịu của bé.
- Đối với trẻ đã mọc răng chưa biết đánh răng, nên vệ sinh đều đặn ngày 2 lần: Buổi sáng khi ngủ dậy và buổi tối trước khi đi ngủ.
- Nên vệ sinh hàng ngày cho bé.
- Đối với người lớn ốm không có khả năng vệ sinh răng miệng: Người chăm sóc đeo gạc và vệ sinh răng, lợi, miệng của người lớn. Có thể dùng nhiều miếng gạc cho mỗi lần vệ sinh.

#### Đối tượng sử dụng:

- Trẻ từ sơ sinh trở lên.
- Vệ sinh hàng ngày cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
- Trẻ ăn sữa ngoài, trẻ đang ăn dặm, trẻ có nguy cơ bị nhiễm nấm cao do thường xuyên phải dùng khí dung hoặc thuốc giảm viêm chứa corticoid gây ức chế miễn dịch.
- Trẻ đang trong thời kỳ chuẩn bị mọc răng và đã mọc răng.
- Trẻ đã mọc răng nhưng chưa biết vệ sinh miệng và đánh răng hàng ngày.
- Người lớn ốm không có khả năng vệ sinh răng miệng.

#### Lưu ý:

Không cho vào nhà vệ sinh sau khi sử dụng.

### 4. BẢO QUẢN

- Nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp, tránh nhiệt độ quá cao.

### 5. HẠN SỬ DỤNG

36 tháng kể từ ngày sản xuất

Tên cơ sở đăng ký lưu hành: CÔNG TY CỔ PHẦN MIPBI VIỆT NAM

Địa chỉ: Số nhà 41A, Ngõ 296, Đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUANG XANH

Địa chỉ: Thôn Hành Lạc, Thị Trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

Hà Nội, Ngày 06 tháng 06 năm 2022



**GIÁM ĐỐC**

**GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Chiến Thắng*