



GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Chiến Thắng*

# GẠC răng miệng MIPBI

An toàn, tiện lợi cho trẻ sơ sinh

HỘP  
30  
GÓI



LÀM SẠCH  
VÀ BẢO VỆ  
RĂNG MIỆNG  
CHO BÉ



- SẢN PHẨM CHỈ DÙNG 1 LẦN
- RỬA TAY SẠCH BẰNG XÀ PHÒNG TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

**THÀNH PHẦN:** Mỗi gạc mềm được tẩm bởi: NaCl, NaHCO<sub>3</sub>, Xylitol, dịch chiết trà xanh, dịch chiết cam thảo, dịch chiết lá hạ, dịch chiết cúc la mã.

**CÔNG DỤNG:** Vệ sinh hàng ngày làm sạch nướu, lưỡi, răng, miệng cho trẻ từ sơ sinh trở lên. Tăng cường cơ chế tự bảo vệ cho lưỡi, nướu, răng, miệng giúp phòng ngừa những vấn đề về răng, miệng (nấm miệng, tưa lưỡi, viêm nướu ...). giúp nướu khỏe trong thời kỳ trẻ mọc răng giúp ngừa sâu răng.

**ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:**

- Trẻ từ sơ sinh trở lên,
- Vệ sinh hàng ngày cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
- Trẻ ăn sữa ngoài, trẻ đang ăn dặm, trẻ có nguy cơ bị nhiễm nấm cao do thường xuyên phải dùng kháng sinh hoặc thuốc giảm viêm chứa Corticoid gây ức chế miễn dịch.
- Trẻ đang trong thời kỳ chuẩn bị mọc răng và đã mọc răng.
- Trẻ đã có răng nhưng chưa biết vệ sinh miệng và đánh răng hàng ngày.
- Người lớn ốm không có khả năng vệ sinh răng miệng.

**CÁCH DÙNG:**

- Sản phẩm chỉ sử dụng 1 lần.
- Rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi sử dụng
- Cho nhẹ ngón tay vào miệng gạc.
- + Lau nhẹ nhàng lên nướu, lưỡi, răng và hai phần bên má.
- + Sử dụng ngay sau khi mở và không sử dụng lại.
- Đối với trẻ đang mọc răng: Khi trẻ đau nhức khi mọc răng, mẹ có thể đeo gạc và xoa nhẹ nơi nướu đang sưng để giảm cảm giác khó chịu của bé.
- Đối với trẻ đã mọc răng chưa biết đánh răng, nên vệ sinh đều đặn ngày 2 lần: Buổi sáng khi ngủ dậy và buổi tối trước khi đi ngủ.
- Nên vệ sinh hàng ngày cho bé.
- Đối với người lớn ốm không có khả năng vệ sinh răng miệng, người chăm sóc đeo gạc và vệ sinh răng, lợi, miệng của người lớn. Có thể dùng nhiều miếng gạc cho mỗi lần vệ sinh.

**BẢO QUẢN:**

- Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
- Hạn dùng 36 tháng kể từ ngày sản xuất (ngày sản xuất và hạn sử dụng ghi trên bao bì sản phẩm).

Lưu ý: Không cho vào nhà vệ sinh sau khi sử dụng

TIÊU CHUẨN: TCCS 01:2022/QX-MIPBI SỐ CB:

Sở hữu nhãn hiệu và phân phối:

CÔNG TY CỔ PHẦN MIPBI VIỆT NAM

Địa chỉ: Số nhà 41A, ngõ 296 đường Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0977 916 689

Email: hmcongty@gmail.com - Website: www.mipbi.vn

Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUANG XANH

Địa chỉ: Thôn Hành Lạc, TT. Như Quỳnh, H. Văn Lâm, T. Hưng Yên.