

CÔNG TY TNHH TM - XNK NOVA
PHARMA - C.T.K

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên sản phẩm: Khăn hăm thảo dược

Chủng loại/mã sản phẩm: Dr. Caries

1. THÀNH PHẦN

Purified Water, Chiết Xuất Trầu Không, Glycerin, Chiết Xuất Lô hội, Propylene Glycol, Methylpropanediol, Chiết Xuất Cúc La Mã, Chiết Xuất Yên Mạch, Berberin Hydrochloride, Chiết Xuất Hoàng Liên, Sodium Benzoate, Isopropyl Methylphenol, Carboxymethyl cellulose, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Tinh Dầu Sả Chanh, Tinh Dầu Tràm Trà.

2. CÔNG DỤNG

Hỗ trợ bảo vệ da bé khỏi rôm sảy, hăm tã.

Giúp làm sạch, ngăn ngừa các tác nhân gây sưng đỏ, mẩn ngứa trên da.

Giúp làm mát, thông thoáng da, làm mềm, tránh tình trạng nứt nẻ và khô da.

3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cách dùng:

Dùng khăn lau trực tiếp lên cơ thể, đặc biệt vùng bẹn, nách, cổ, kẽ tay, kẽ chân,... Lau 2 lần/ngày.

Đối tượng sử dụng:

Dùng hàng ngày cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Dùng cho trẻ gặp các vấn đề ngoài da như: Hăm da, mẩn ngứa, rôm sảy, viêm da...

Người lớn tuổi không có khả năng tắm rửa, vệ sinh.

Lưu ý:

- Vào mùa đông, nhiệt độ khăn bị lạnh do môi trường, có thể cho cả túi khăn vào bát nước nóng để khăn ấm tầm 32.2 - 35°C.

- Khăn có thể dùng lau lại nhiều lần đến khi hết ẩm.

- Không dùng quá lạnh.

- Không dùng quá nóng.

- Không cho vào nhà vệ sinh sau khi sử dụng.

- Nếu mỗi túi khăn đã mở để sử dụng không hết, có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Túi khăn chưa mở, bảo quản ở nhiệt độ thường.

4. BẢO QUẢN

- Để xa tầm tay trẻ em.



