

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

1. Mô tả trang thiết bị y tế

Băng bột bó xương

2. Mục đích/Chỉ định sử dụng

Dùng để băng cố định trong trường hợp bệnh nhân bị gãy xương

3. Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Dùng băng lót hoặc thun lót bó bột để bọc vùng chấn thương cần bó

Bước 2: Cuộn thêm một lớp bông lót bó bột lên lớp trên

Bước 3: Đeo găng tay

Bước 4: Dùng tay mở xé bao bì bột bó và lấy ra khỏi túi

Bước 5: Nhúng bột bó vào nước (15 – 30 độ C) trong khoảng 1-3 giây rồi vắt nước (lưu ý không nên vắt khô quá)

Bước 6: Cuộn lớp bột bó lên lớp bông lót theo các lớp chồng lên nhau tại vùng cần cố định hay chỉnh hình. Cuộn 3-4 lớp ở các vùng thông thường, cuộn 5-6 lớp ở những vùng chịu lực đè của cơ thể

Bước 7: Sau khi cuộn bột bó có thể chỉnh khuôn sao cho phù hợp và để thạch cao đông cứng (sau khoảng 2-4 phút)

4. Chống chỉ định

- Không băng những nơi có nguy cơ sưng tấy

5. Cảnh báo và thận trọng

- Nước nhúng không quá 30 độ C
- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp
- Chỉ sử dụng 1 lần, sử dụng xong thì bỏ đi

Đại diện hợp pháp của cơ sở



GIÁM ĐỐC
Đoàn Quốc Chuẩn