

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

### 1. Mô tả trang thiết bị y tế

Băng dán cố định kim luôn

### 2. Mục đích/Chỉ định sử dụng

Dùng để dán cố định kim luôn tĩnh mạch khi sử dụng kim luôn cho bệnh nhân.

### 3. Hướng dẫn sử dụng

- Đặt gạc vô khuẩn lót dưới thân kim luôn.
- Tháo lớp bảo vệ.
- Đặt phần có hình chữ V quanh công tiêm nhằm cố định công tiêm chắc chắn hơn.
- Tháo lớp bìa ra và ấn nhẹ để băng dính chắc.
- Dán miếng băng cố định đối lập quanh công tiêm và bóc thanh kẹp.
- Làm phẳng và ấn nhẹ để băng dính chắc hơn.
- Phải loại bỏ sản phẩm theo hướng của chân lông, song song với da, bằng cách nắm sản phẩm ở một đầu và giữ chặt da bằng tay còn lại.

### 4. Cảnh báo và thận trọng

- Sản phẩm chỉ sử dụng một lần
- Không sử dụng nếu bao bì bị hư hỏng
- Không sử dụng sản phẩm đã hết hạn

### 5. Bảo quản

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, an toàn, hợp vệ sinh, tránh ánh nắng trực tiếp.

### 6. Lưu ý

Khi có dấu hiệu kích ứng, ngưng sử dụng sản phẩm và tham vấn ý kiến của nhân viên y tế

**Đại diện hợp pháp của cơ sở**



**GIÁM ĐỐC**  
*Đoàn Quốc Chuẩn*