

Phát hiện thời điểm rụng trứng.

- Được đăng ký bảo hộ độc quyền tại Việt Nam và được phân phối độc quyền bởi Công ty Cổ Phần PSC Hà Nội
- Địa chỉ: 1002 Tòa nhà Licogi 18 TT Quang Minh, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội
- Điện thoại: 0243.791.6066 - Fax: 0243.791.6099

- Bộ sản phẩm bao gồm:
- + 05 test kiểm tra
 - + 05 cốc đựng nước tiểu

SĐK:




Registering Trademark IN KOREA

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Lấy nước tiểu vào cốc chén nhựa, sẽ hóa nhớt theo chỗ nhều chỗ V
2. Cắm que thử vào hướng mũi tên chỉ xuống, không để que que quá chỗ mũi.
3. Lấy que thử sau 5-10 giây và đặt lên kết phẳng (chúng hoạt như chún dụng nước tiểu).
4. Chờ 5-6 giây sẽ lập kết quả như hình và bên. Cần đọc kết quả trong 5 phút kể từ khi que thử cho kết quả.
5. Để đảm bảo của việc kiểm tra các que thử phải được rửa sạch và lau khô.
6. Trong trường hợp này là que thử: **Không rụng trứng** hoặc **không rụng trứng**.
7. Thời gian sử dụng của que thử là 12 tháng kể từ ngày sản xuất.
8. Lưu ý: Không bỏ que thử trong tủ lạnh, Tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp.

HƯỚNG DẪN CÁCH THỬ TEST NHƯNG THƯỜNG

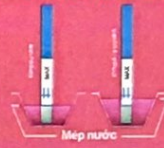

CỐC THỬ THÔNG MINH

HƯỚNG DẪN ĐỌC KẾT QUẢ

HƯỚNG DẪN NHẢY BẬT ĐẦU KIỂM TRA THÔNG THƯỜNG

Lưu ý:
Mũi tên chỉ hướng
Exp Date:
Barcode

(12,9 x 6,2 x 3,6 cm)