

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Dung dịch sát khuẩn ống tủy R4+

I. Sự mô tả:

R4 + CHX 2% là dung dịch chlorhexidine digluconate. Nó được thiết kế để tưới và làm sạch ống tủy sau khi đo đạc thiết bị trong điều trị nội nha. Loại bỏ lớp vết bẩn bằng dung dịch tưới thích hợp như dung dịch EDTA hoặc Axit Citric 12,5%.

Chỉ dành cho mục đích sử dụng chuyên nghiệp.

II. Hướng dẫn sử dụng:

- Sử dụng EDTA 17% như một chất rửa trước trong ống tủy để loại bỏ lớp bẩn.
- Rửa bằng Natri Hypochlorit (NaOCl).
- Rửa sạch NaOCl bằng nước vô trùng hoặc dung dịch gây mê
- Đổ đầy ống tiêm với R4 + CHX 2% (khuyến nghị 5-10 ml). Gắn chặt đầu tưới vào ống tiêm.
- Tưới liên tục tối thiểu 2 phút. (Nên dùng 10 - 20 ml mỗi ống).
- Tháo và vứt bỏ ống tiêm và đầu tưới.
- Làm khô và bịt kín ống tủy.

III. Cảnh báo và Thận trọng:

Cảnh báo

- Không được trộn lẫn các sản phẩm có chứa chlorhexidine với các sản phẩm có chứa natri hypochlorit để tránh hình thành kết tủa có độ hòa tan thấp màu nâu đỏ.
- Tránh xa tầm tay của trẻ em.
- Tránh tiếp xúc với da và mắt.

Thận trọng khi sử dụng

- Đọc MSDS để biết thêm thông tin về sự an toàn và cách xử lý của sản phẩm.
- Tưới không được làm kích ứng vùng ngọng.
- Không ăn hoặc tiêm.
- Không sử dụng như một loại nước súc miệng.

IV. Điều kiện bảo quản

Bảo quản ở nhiệt độ phòng (2 ° C-30 ° C), nơi khô ráo, tránh nhiệt và ánh nắng trực tiếp.



Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quốc Huy