

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÌNH DẪN LƯU

- Kiểm tra bao bì sản phẩm để bảo đảm tính toàn vẹn và hạn dùng, sau đó lấy sản phẩm ra khỏi bao bì
- Khi dây hút dịch đã được đặt vào trong vết thương, gắn chặt dây nối bình tại cổng hút của bình dẫn lưu, kết nối dây hút dịch với thương với đầu nối
- Cổng đổ dịch phải được mở
- Đặt bình dẫn lưu trên một mặt phẳng cứng với cổng hút và cổng đổ dịch hướng lên trên
- Nén nhẹ bằng hai tay vào bình dẫn lưu và đóng ngay cổng đổ dịch khi bình đang bị nén. MỞ KHÓ trên dây dẫn của bình để bắt đầu hút dịch
- Làm trống bình ngay trước khi mức dịch vết thương đạt tối đa thể tích. Mở cổng đổ dịch để lấy dịch vết thương ra khỏi bình

Nhà phân phối:

Công ty TNHH MTV Thiết bị Y tế Thanh Lộc Phát
198-200 Nguyễn Mậu Tài, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

