


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế: Công ty TNHH DKSH Việt Nam, địa chỉ tại Số 23 Đại lộ Độc Lập, Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương xác nhận tài liệu đính kèm.

Ngày .08.. tháng .07.. năm 2022

Công ty TNHH DKSH Việt Nam

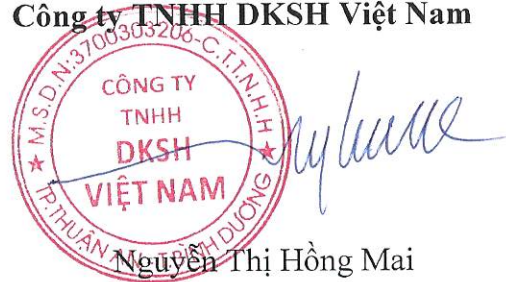

Nguyễn Thị Hồng Mai

Trưởng phòng đăng ký sản phẩm



VIGEL[®]

2 in 1

Lubricant & Massage



Aloe Vera

Net : 125 g

MFG :
BN :
EXP :

Vigel 2 in 1 Lubricant contains Aloe Vera extract, is a lubricant in the intimate area and also as a lubricant in the anal area on polyurethane condom usage.
Vigel 2 in 1 Lubricant is colorless, odorous, water soluble and oil free.



Composition:

Aqua (Water), Propylene glycol, Hydroxyethylcellulose, Aloe Barbadosensis Extract, Methylparaben.

Warning:

Avoid contact with eyes.
If irritation occurs, discontinue use of this product.
In case of continuous irritation, contact your doctor.
Keep out of reach of children.
Store below 30°C. Protect from direct sunlight.

CAUTION:

VIGEL 2 in 1 Lubricant IS NOT CONTRACEPTIVE.

How to use:

Apply a small amount to the intimate area, and if needed, clean back after use.
KEMENKES RI AKD 211/045/10024

Manufactured by

KONIMEX

Sukoharjo 37352, Central Java
Indonesia

125 mm

45 mm

Biru Gelap:
PANTONE 293 C

Biru Terang:
Pantone 631 C

VIGEL[®]

Nhãn phụ:



Gel bôi trơn Vigel 2 in 1

Gel bôi trơn Vigel® 2 in 1

Khối lượng tịnh: 125g

Vigel® 2 in 1 được sử dụng như là chất bôi trơn bổ sung cho vùng kín hoặc khi dùng bao cao su. Vigel® 2 in 1 cũng có thể được sử dụng để massage. Thành phần chứa nha đam giúp làm mềm và ngăn ngừa kích ứng da. Vigel® 2 in 1 không màu, không mùi, tan trong nước và không chứa dầu. Vigel® 2 in 1 có thể dễ dàng rửa sạch bằng nước. **Công dụng:** Làm giảm triệu chứng khô âm đạo, giảm sự khó chịu khi quan hệ, giúp bôi trơn khi dùng bao cao su cũng như dùng để massage. **Hướng dẫn sử dụng:** Có thể dùng cho cả nam và nữ. Thoa gel lên vị trí cần bôi trơn hoặc massage, thoa lại nếu cần. Đóng nắp chặt sau khi sử dụng. **Bảo quản:** Bảo quản dưới 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp. **Chống chỉ định:** không có chống chỉ định. **Lưu ý:** Vigel® 2 in 1 không phải là biện pháp tránh thai. **Cảnh báo:** Tránh tiếp xúc với mắt. Ngưng sử dụng nếu bạn bị kích ứng. Tham khảo ý kiến bác sĩ nếu bạn bị kích ứng liên tục. Để xa tầm tay trẻ em. **Chủ sở hữu/ Nhà sản xuất:** PT Konimex, Desa Sanggrahan, Kec. Grogol, Sukoharjo, Indonesia. **Xuất xứ:** Indonesia. **Số lưu hành:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. **Chủ sở hữu số lưu hành:** Công ty TNHH DKSH Việt Nam, 23 Đại Lộ Độc Lập, Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, T. Bình Dương, Việt Nam. **Sản xuất theo:** TCCS: 205:2021/DKSH. **NSX, Số lô, HSD:** xem MFG., B/N., EXP. trên bao bì. NSX, HSD ghi theo thứ tự tháng năm; ngày hết hạn là ngày cuối cùng của tháng hết hạn.

Nama : Vigel 2in1 label viet Exp 60x35mm 260322.ai

Pengganti : Vigel 2in1 label viet Exp 60x35mm 230322.ai