



Gạc tưa lưỡi

TREE

Xylitol, dịch chiết rau Ngót
Chiết xuất Trà xanh, NaCl



THÀNH PHẦN: Gạc trắng mềm được tẩm dung dịch chứa các thành phần: Xylitol, Dịch chiết rau ngót, Chiết xuất trà xanh, Natri bicarbonate (NaHCO₃), NaCl, nước tinh khiết

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG: Vệ sinh hàng ngày làm sạch lưỡi, nướu, răng miệng cho trẻ từ sơ sinh trở lên. Tăng cường cơ chế tự bảo vệ cho lưỡi, nướu, răng, miệng giúp phòng chống những bệnh về răng miệng (nấm miệng, tưa lưỡi, viêm nướu...) giúp nướu khỏe trong thời kỳ trẻ mọc răng, giúp chống sâu răng.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

Trẻ sơ sinh trong thời kì chuẩn bị mọc răng và đã mọc răng.
Trẻ đã có răng nhưng chưa biết vệ sinh miệng và đánh răng hàng ngày.
trẻ có nguy cơ bị nhiễm nấm cao do thường xuyên phải dùng kháng sinh hoặc thuốc giảm đau chống viêm chứa Corticoid gây ức chế miễn dịch.
Người lớn bị ốm không có khả năng vệ sinh răng miệng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- Sản phẩm chỉ sử dụng 1 lần.
- Rửa sạch tay bằng xà phòng trước khi sử dụng.
- Cho nhẹ ngón tay vào miệng gạc:
- + Lau nhẹ nhàng lên nướu, lưỡi, răng và hai phần bên má.
- + Sử dụng ngay sau khi mở và không sử dụng lại.
- Đối với trẻ đang bị tưa lưỡi: lau nhẹ nhàng lên lưỡi bé, nên dùng 3 lần/ngày.
- Đối với trẻ đang mọc răng: Khi trẻ đau nhức khi mọc răng, mẹ có thể đeo gạc và xoa nhẹ nơi nướu đang sưng để giảm cảm giác khó chịu của bé.
- Đối với trẻ đã mọc răng nhưng chưa biết đánh răng, nên vệ sinh đều đặn ngày 2 lần: buổi sáng khi ngủ dậy và buổi tối trước khi đi ngủ.
- Đối với người lớn bị ốm không có khả năng vệ sinh răng miệng, người chăm sóc đeo gạc và vệ sinh răng, lợi, miệng của người ốm. Có thể dùng nhiều miếng gạc cho mỗi lần vệ sinh.

CHÔNG CHỈ ĐỊNH: Không sử dụng cho người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG: Sản phẩm chỉ sử dụng một lần. Nên sử dụng ngay sau khi mở gói. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

BẢO QUẢN: Bảo quản trong bao bì ban đầu của sản phẩm, để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

SỐ TCCS: 47/2022/TBYT-TP

SỐ LƯU HÀNH TBYT:



TREE PHARMA

Chủ sở hữu sản phẩm chủ sở hữu số lưu hành sản phẩm và phân phối sản phẩm

Công ty TNHH Tree Pharma
Địa chỉ: B13 ngách 12 ngõ 376 đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc,
Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Tel: 085.850.1693 * Email: treepharmaco@gmail.com
Website: treepharma.vn

Sản xuất tại: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VGAS**
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương,
Xã Hà Hồi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TREE PHARMA



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thế Anh