

Gạc tưa lưỡi TREE
Xylitol, dịch chiết rau Ngót
Chiết xuất Trà xanh, NaCl

1 gói

WARRANTY:

- Cần phải chỉ định bằng 3 lần
- Chỉ nên bôi nhẹ nhàng và không chà xát khi sử dụng
- Chỉ cho người tự bôi miệng gạc
- Lưu ý: Tránh tiếp xúc mắt, mũi, họng và tai phải làm ướt
- Sử dụng ngay sau khi mở và không sử dụng lại
- Chỉ nên dùng 3 lần mỗi ngày
- Chỉ nên bôi gạc vào buổi sáng và buổi tối trước khi ngủ, mẹ có thể bôi gạc vào buổi trưa nếu trẻ thức giấc
- Chỉ nên bôi gạc vào buổi sáng và buổi tối trước khi ngủ, mẹ có thể bôi gạc vào buổi trưa nếu trẻ thức giấc
- Chỉ nên bôi gạc vào buổi sáng và buổi tối trước khi ngủ, mẹ có thể bôi gạc vào buổi trưa nếu trẻ thức giấc

CHỈ ĐỊNH: Không sử dụng cho người dị ứng các thành phần của sản phẩm.

CHẤM SẠCH VÀ THẬN TRỌNG: Sản phẩm chỉ sử dụng một lần. Hạn sử dụng ngay sau khi mở gói. Nếu bị hỏng phải sử dụng trước khi đóng.

ĐỐI QUANG: Bảo quản trong bao bì kín khí của sản phẩm để tránh ánh sáng, tránh ẩm ướt.

THÀNH PHẦN: Xylitol, dịch chiết rau Ngót, Chiết xuất Trà xanh, NaCl.

Số lô SX: [Barcode]

Ngày SX: [Barcode]

Hạn sử dụng: [Barcode]

THREE PHARMA
Chỉ số hiệu sản phẩm, chỉ số hiệu số lưu hành sản phẩm và mã vạch sản phẩm.

CÔNG TY TNHH Tree Pharma
Số 01/02 Đường 12, Khu 3, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại: 0438 351 1111 - Fax: 0438 351 1111
Số fax: 0438 351 1111 - Email: treepharma@gmail.com - Website: treepharma.vn

* Vệ sinh làm sạch lưỡi, nướu, răng miệng cho trẻ.
* Giúp phòng chống những bệnh về răng miệng.
* Giúp nướu khỏe trong thời kỳ trẻ mọc răng, chống sâu răng.

Gạc tưa lưỡi TREE
Xylitol, dịch chiết rau Ngót
Chiết xuất Trà xanh, NaCl

Gạc tưa lưỡi TREE
Xylitol, dịch chiết rau Ngót
Chiết xuất Trà xanh, NaCl

Gạc tưa lưỡi TREE
Xylitol, dịch chiết rau Ngót
Chiết xuất Trà xanh, NaCl

THÀNH PHẦN: Gạc trắng mềm được tẩm dung dịch chứa các thành phần: Xylitol, Dịch chiết rau ngót, Chiết xuất trà xanh, Natri bicarbonate (NaHCO3), NaCl, nước tinh khiết.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG: Vệ sinh hàng ngày làm sạch lưỡi, nướu, răng miệng cho trẻ từ sơ sinh trở lên. Tăng cường có thể tự bôi vào buổi sáng, trưa, chiều, giúp phòng chống những bệnh về răng miệng (đau miệng, lở loét, viêm nướu...) giúp nướu khỏe trong thời kỳ trẻ mọc răng, giúp chống sâu răng.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG: Trẻ sơ sinh trong thời kỳ chuẩn bị mọc răng và đã mọc răng. Trẻ đã có răng nhưng chưa biết vệ sinh miệng và đánh răng hàng ngày.

Trẻ có nguy cơ bị nhiễm nướu cao do thường xuyên phải dùng khi dùng thuốc hoặc giảm đau chống viêm chứa Corticoid gây ức chế miễn dịch. Người làm từ lâu không có làm răng và sinh răng miệng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- Sản phẩm chỉ sử dụng 1 lần.
- Rửa sạch tay bằng xà phòng trước khi sử dụng.
- Cho nhẹ nhàng tay vào miệng gạc.
- Lau nhẹ nhàng lên nướu, lưỡi, răng và hai phần bên má.
- Sử dụng ngay sau khi mở và không sử dụng lại.
- Đối với trẻ đang bị tưa lưỡi: lau nhẹ nhàng lên lưỡi 3-4 lần, nên dùng 3 lần/ngày.
- Đối với trẻ đang mọc răng: Khi trẻ đau nhức: khi mọc răng, mẹ có thể đeo gạc và xoa nhẹ nơi nướu đang sưng để giảm cảm giác khó chịu của bé.
- Đối với trẻ đã mọc răng nhưng chưa biết đánh răng, nên vệ sinh đầu tiên ngày 2 lần: buổi sáng khi ngủ dậy và buổi tối trước khi đi ngủ.
- Đối với người lớn bị ỉm không có khả năng vệ sinh răng miệng, người chăm sóc đeo gạc và vệ sinh răng, lợi, miệng của người ỉm. Có thể dùng nhiều miếng gạc cho mỗi lần vệ sinh.

Số lô SX: [Barcode]

Ngày SX: [Barcode]

Hạn sử dụng: [Barcode]

30 gói

CHỖNG CHỈ ĐỊNH: Không sử dụng cho người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG: Sản phẩm chỉ sử dụng một lần. Hạn sử dụng ngay sau khi mở gói. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

BẢO QUẢN: Bảo quản trong bao bì kín khí của sản phẩm, để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

SỐ TCCS: 47/2022/TBYT-TP

SỐ LƯU HÀNH TTYT: [Barcode]

THREE PHARMA

Chỉ số hiệu sản phẩm, chỉ số hiệu số lưu hành sản phẩm và mã vạch sản phẩm.


CÔNG TY TNHH Tree Pharma
Địa chỉ: B13 ngõ 12 phố 376 đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Tel: 0438 351 1111 * Email: treepharma@gmail.com
Website: treepharma.vn

Sản xuất tại: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VGAS**
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương, Xã Hà Hồi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

* Vệ sinh làm sạch lưỡi, nướu, răng miệng cho trẻ.
* Giúp phòng chống những bệnh về răng miệng.
* Giúp nướu khỏe trong thời kỳ trẻ mọc răng, chống sâu răng.

30 gói

CÔNG TY TNHH TREE PHARMA

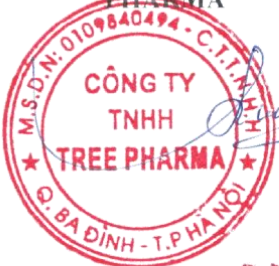

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thế Anh