


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TAY DAO ĐỐT ĐIỆN SỬ DỤNG MỘT LẦN

* Hướng dẫn sử dụng:

- Kiểm tra tình trạng hàng hóa : Không sử dụng sản phẩm đã hết hạn dùng, không sử dụng nếu túi đóng gói đã bị mở ra trước hay bị rách
- Cắm tay dao vào máy, đảm bảo kết nối tốt giữa dây tay đốt điện và máy cắt đốt
- Tay đốt có 2 nút điều khiển
 - CUT: Chế độ cắt
 - COAG: Chế độ đốt
- Điều chỉnh dòng điện cho dao mổ từ xa nhờ nút điều chỉnh
- Không nên tái sử dụng lại tay dao đốt điện sử dụng 1 lần vì có thể gây nhiễm trùng hoặc lây nhiễm chéo.



GIÁM ĐỐC
Phạm Công Toàn