


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
BỘ ỒNG TƯỚI HÚT CHO DAO MỒ SIÊU ÂM
SONASTAR/ MXA-HF

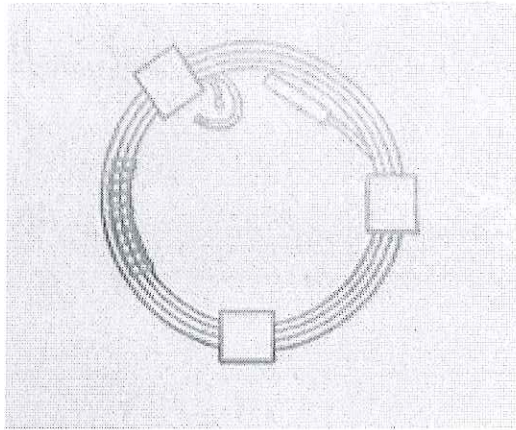

CÔNG TY TNHH TBYT TRĂNG THI 18



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Diệu Linh

Hà Nội – 2021

I. THÔNG TIN CHUNG

Chỉ định sử dụng:

Bộ ống tưới hút được chỉ định trong việc cung cấp dung dịch tưới đến đầu hút để làm sạch các mô bị phân mảnh, giảm tắc nghẽn, làm mát đầu hút và tay khoan trong các chuyên khoa phẫu thuật sau:

- Phẫu thuật thần kinh
- Phẫu thuật tiêu hóa
- Phẫu thuật tiết niệu
- Phẫu thuật tạo hình
- Phẫu thuật tổng quát
- Phẫu thuật chỉnh hình
- Phẫu thuật phụ khoa
- Phẫu thuật ngực
- Phẫu thuật nội soi
- Phẫu thuật nội soi lồng ngực

Chống chỉ định:

Không được chỉ định và không được sử dụng để truyền dịch qua đường tiêu hóa, truyền thuốc hoặc cho bất kỳ mục đích duy trì sự sống nào, không được chỉ định để hút u xơ tử cung

Tác dụng bất lợi:

Không có tác dụng bất lợi

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

2.1 HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH

- Cắm cọc IV và treo túi nước tưới lên cọc
- Kết nối đoạn cuối của ống tưới có phân sọc vàng với dây truyền dịch.
- Mở nắp máy bơm, gắn phần ống tưới vào máy bơm
- Gắn phần ống hút có điểm đánh dấu màu xanh vào ván xả của máy
- Gắn đầu cuối của ống hút vào bình hút, cổng "Patient"
- Kết nối ống tưới hút vào tay dao

2.2 HƯỚNG DẪN LAU RỬA, TIỆT TRÙNG, BẢO QUẢN, BẢO TRÌ

A	TIỆT TRÙNG
	- Bộ ống tưới hút đã được tiệt trùng sẵn
B	BẢO QUẢN
	- Bảo quản ở nhiệt độ phòng trong môi trường khô ráo, tránh ánh sáng. - Không sử dụng ống tưới hút hết hạn sử dụng

III. CẢNH BÁO VÀ PHÒNG NGỪA

- Sản phẩm chỉ được sử dụng bởi bác sĩ được đào tạo sử dụng cho phẫu thuật. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Sản phẩm đóng gói tiệt trùng không sử dụng nếu bao bì có dấu hiệu bị làm hư hại.
- Sản phẩm đóng gói tiệt trùng sử dụng một lần, không tái sử dụng, vứt bỏ ngay sau khi sử dụng.
- Kiểm tra sản phẩm trước khi sử dụng, xem có bị hư hại, hỏng, dấu hiệu bất thường không. Không sử dụng các ống tưới hút bị hư hỏng.

