

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI Y TẾ BIDUPHAR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI
(Model: NATURAL)

1. Hướng dẫn sử dụng:

- Đưa nhẹ đầu vòi phun sương vào từng bên mũi. Ấn nhẹ, dứt khoát đầu vòi để xịt dung dịch vào khoang mũi, xịt đủ thể tích để dung dịch kéo theo chất nhầy, bụi bẩn ra ngoài
- Lau sạch đầu vòi sau khi sử dụng. Xịt vệ sinh ngày 4 – 6 lần khi đang có bệnh lý về mũi
- Xịt 2 lần/ngày để vệ sinh và phòng các bệnh về mũi.

2. Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.

3. Cảnh báo:

- Không sử dụng dung dịch nào thay thế khi chai hết
- Bảo quản ở nhiệt độ thường, nơi khô thoáng, xa tầm tay trẻ em.
- Chống chỉ định: dị ứng với bất kỳ thành phần nào của dung dịch

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI Y TẾ BIDUPHAR
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Huyền