

*Tp. Buôn Ma Thuột, ngày 20 tháng 07 năm 2022*

## **HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

### **Túi đựng dụng cụ để tiệt trùng dùng trong y tế**

#### **Túi Tyvek: Tyvek Heat – Sealing Reel**

- Cho dụng cụ y tế vào trong túi ép, dùng máy ép chuyên dụng để ép chặt sản phẩm ở nhiệt độ 190-230°C. Sau đó đưa sản phẩm đi tiệt trùng theo quy trình của bệnh viện.
- Cần kiểm tra sự đổi màu của chỉ thị tiệt trùng để xác định sản phẩm đã qua quy trình tiệt trùng chưa.
- Chỉ thị màu không thể xác định độ tiệt trùng của sản phẩm sau tiệt trùng. Túi Tyvek chỉ được sử dụng với máy tiệt trùng Plasma chuyên dùng ở nhiệt độ tiệt trùng thấp

### **ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ SỞ**



**GIÁM ĐỐC**  
*DS. Võ Văn Hùng*