




TÚI TYVEK
TYVEK HEAT-SEALING REEL

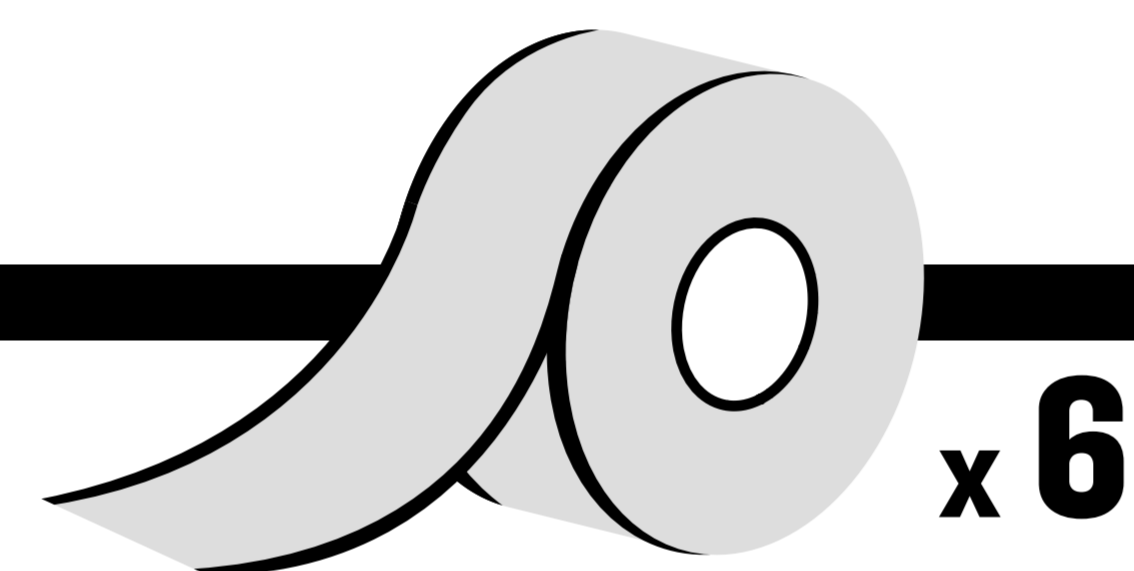

x **6**


100mm x 70m

- ↙ **Công dụng:**
Túi ép dụng dụng cụ y tế tiệt trùng.
- ↙ **Hướng dẫn sử dụng:**
Đặt dụng cụ y tế vào trong túi.
Ép chặt miệng túi ở nhiệt độ 190-230°C
Tiệt trùng bằng tia Plasma theo quy trình của đơn vị sử dụng
Kiểm tra sự chuyển màu của chỉ thị nhiệt

- ↙ **Bảo quản:**
Nơi khô ráo, tránh ánh nắng mặt trời

SỐ ĐKLH: 0000000000000000


ISO 13485:2016

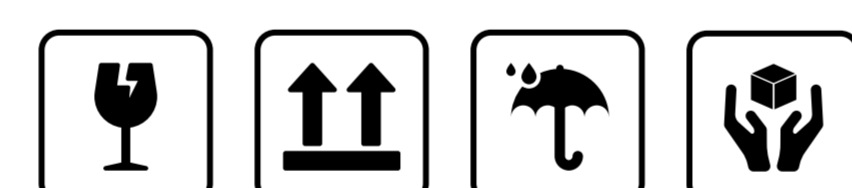

LOT:
NSX:
HSD:



TÚI TYVEK
TYVEK HEAT-SEALING REEL

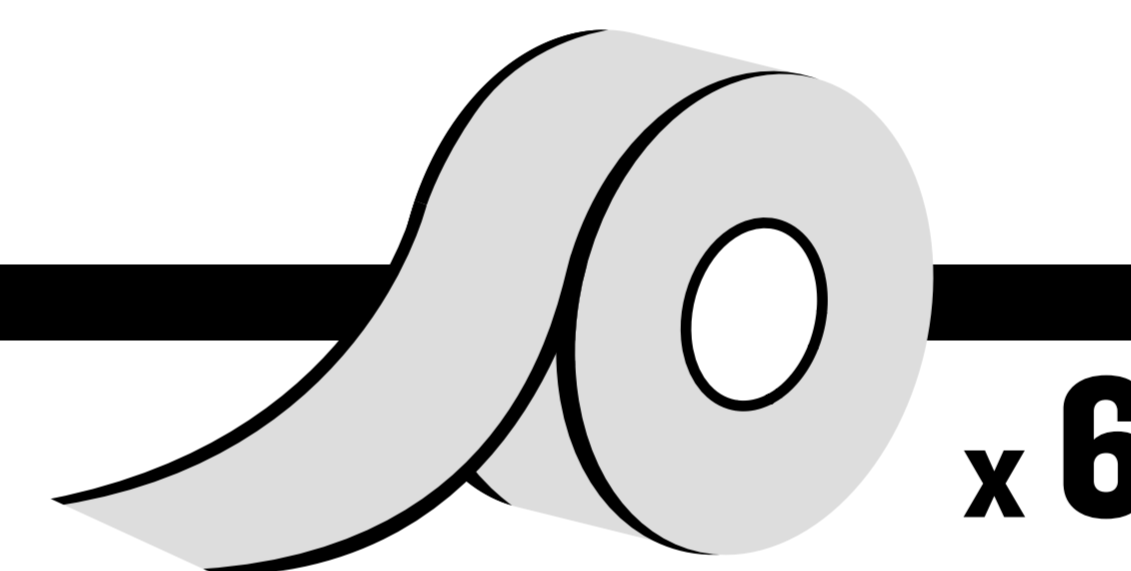

x **6**


100mm x 70m

- ↙ **Công dụng:**
Túi ép dụng dụng cụ y tế tiệt trùng.
- ↙ **Hướng dẫn sử dụng:**
Đặt dụng cụ y tế vào trong túi.
Ép chặt miệng túi ở nhiệt độ 190-230°C
Tiệt trùng bằng tia plasma theo quy trình của đơn vị sử dụng
Kiểm tra sự chuyển màu của chỉ thị nhiệt

- ↙ **Bảo quản:**
Nơi khô ráo, tránh ánh nắng mặt trời

SỐ ĐKLH: 0000000000000000

ISO 13485:2016

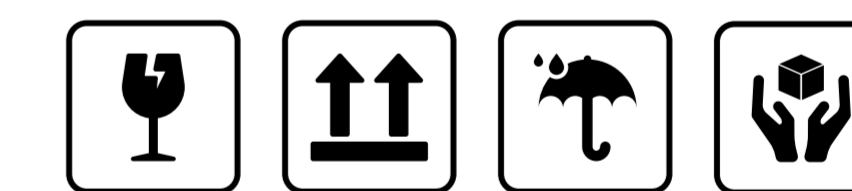

LOT:
NSX:
HSD:

Nhà phân phối:

Nhà sản xuất:
**CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ
TẠI LONG AN**
Khu nhà xưởng cao tầng, KCN Long Hậu, Long
Hậu, Cần Giuộc, Long An, Việt Nam
www.ipcpharma.vn

Nhà phân phối:

Nhà sản xuất:
**CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ
TẠI LONG AN**
Khu nhà xưởng cao tầng, KCN Long Hậu, Long
Hậu, Cần Giuộc, Long An, Việt Nam
www.ipcpharma.vn