

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Sản phẩm: XỊT HỌNG KEO ONG

Chủng loại/mã sản phẩm: AC POLIS

1. THÀNH PHẦN

Keo ong, Mật ong, Chiết xuất Tía tô, Chiết xuất Kim ngân, Chiết xuất Cát cánh, Tinh dầu Tràm, Tinh dầu bạc hà, Tinh dầu Gừng, Menthol, Phụ liệu vừa đủ.

2. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

- Giúp kháng khuẩn, ngăn ngừa và giảm các triệu chứng của viêm nhiễm vùng họng.
- Hỗ trợ làm giảm sự phát triển của vi khuẩn trong khoang miệng.
- Hỗ trợ trong các liệu pháp phòng ngừa và làm giảm các triệu chứng ho khan, ho có đờm, ho do thay đổi thời tiết, khô nóng rất hầu họng, khó nuốt, đau họng khản tiếng, vướng họng, ngứa họng do cảm cúm, do thay đổi thời tiết, do nằm điều hòa hoặc do ô nhiễm môi trường.

3. ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

- Người bị viêm họng cấp và mãn tính, viêm amidan.
- Ho khan, ho gió, ho nhiều đờm, ho do cảm cúm, cảm lạnh, ho do thay đổi thời tiết, ho lâu ngày không khỏi.
- Khản tiếng, đau rát họng, khản tiếng do ho kéo dài.

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Lắc kỹ trước khi dùng
- Tháo nắp đậy, nhẹ nhàng đưa đầu xịt vào trong khoang miệng gần vùng bị viêm.
- Ấn dứt khoát cho dung dịch phun ra dạng sương bao phủ vùng bị viêm.
- Sau khi dùng xong dung dịch dính vào đầu xịt, cần vệ sinh đầu xịt trước khi đậy nắp sản phẩm.

Liều dùng:

- Người lớn: Ngày dùng 3-4 lần, mỗi lần xịt 2-4 cái.
- Trẻ em trên 1 tuổi: Ngày dùng 2-3 lần, mỗi lần xịt 2-3 cái.
- Có thể tăng số lượng dùng tùy vào tình trạng sức khỏe.
- Dùng được cho phụ nữ có thai và cho con bú.

5. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Không dùng cho người quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

6. CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG



- Kiểm tra bao bì sản phẩm trước khi sử dụng. Không sử dụng khi bao bì thiết bị y tế bị hư hỏng.

7. BẢO QUẢN

- Để nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30⁰C, tránh ánh sáng trực tiếp.
- Để xa tầm tay trẻ em.

8. HẠN SỬ DỤNG

- 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2022

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Chi