

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên sản phẩm: **Khăn Hạ Sốt**

Chủng loại/mã sản phẩm: **Baby Shark 3M+**

### 1. THÀNH PHẦN

Trong mỗi khăn được tẩm bởi gel hạ sốt gồm: Nước tinh khiết, Carbomer, Tinh dầu cúc la mã, Xanthan gum, Glycerin, Lô hội, Dịch chiết cỏ nhọ nồi, Dịch chiết kinh giới, Dịch chiết tía tô, Tinh dầu trà, Tinh chất chanh, Menthol (Tinh dầu bạc hà), Sodium benzoate, Chlorophyll (diệp lục từ tảo), Vitamin E, Aluminium glycinate, Glycerin, Natri polyacrylate, Eucalytol, Hương liệu.

### 2. CÔNG DỤNG

Khăn lau chườm giúp hạ nhiệt, giảm sốt trong trường hợp trẻ sốt chưa cần dùng đến thuốc hạ sốt.

Dùng phối hợp cùng thuốc hạ sốt, giúp hạ nhiệt và giảm sốt cho trẻ.

Giúp hạ nhiệt, hạ sốt, ngăn ngừa co giật, giảm đau đầu, đau răng, say nắng, stress,...

Làm sạch và mát vùng da trẻ bị ngứa, rôm sảy, mụn nhọt, hăm tã, viêm da. Dùng phối hợp trước khi bôi các loại kem bôi ngoài da cho bé.

Lau làm mát da bé, tạo cảm giác dễ chịu, sảng khoái cho bé khi thời tiết nắng nóng hay khi trẻ quấy khóc, khó chịu.

Lau ngoài da phòng ngừa muỗi đốt, côn trùng cắn và làm mát giảm ngứa vết côn trùng đốt.

### 3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

#### Cách dùng:

Đắp khăn đã tẩm sẵn dịch ở các vị trí có mạch máu lớn đi qua: 2 nách, 2 bên cổ, 2 bên bẹn, trán, gan bàn chân, bàn tay.

Dùng khăn đã tẩm sẵn dịch lau toàn bộ cơ thể, đặc biệt là các vị trí: nách, cổ, bẹn, đầu, trán, tay, chân, lưng.

Lau liên tục đến khi cơ thể có cảm giác dễ chịu do đã giảm được nhiệt độ.

Trẻ bị ngứa, rôm sảy, mụn nhọt, hăm tã, viêm da, khi bị muỗi, côn trùng cắn, trước khi bôi các loại kem ngoài da: dùng khăn đã tẩm lau sạch các vùng da này.

Khi trẻ quấy khóc, cảm giác khó chịu khi thời tiết nắng nóng: dùng khăn đã tẩm sẵn dịch lau toàn bộ cơ thể.

Trước khi đến những vùng có nguy cơ bị muỗi đốt, côn trùng cắn: Dùng khăn lau cơ thể trẻ.

#### Đối tượng sử dụng:

Dùng cho trẻ từ 3 tháng tuổi trở lên.

Trẻ em bị sốt do mọc răng, sau khi tiêm phòng, sốt do nhiễm khuẩn, nhiễm virus, hoặc sốt do nguyên nhân khác.

Trẻ em quấy khóc, có cảm giác khó chịu khi thời tiết nắng nóng.

Trẻ em ở vùng có nguy cơ bị muỗi đốt, côn trùng cắn, hoặc khi đã bị muỗi hoặc côn trùng cắn.

Trẻ em đang bị ngứa, rôm sảy, mụn nhọt, hăm tã, viêm da, cần vệ sinh sạch trước khi bôi các loại kem bôi ngoài da cho bé.

Dùng an toàn cho phụ nữ có thai và cho con bú.

#### **Lưu ý:**

- Vào mùa đông, nhiệt độ khăn bị lạnh do môi trường, có thể cho cả túi khăn vào bát nước nóng để khăn ấm tầm 32.2 - 35°C.
- Khăn có thể dùng lau lại nhiều lần đến khi hết ẩm.
- Không dùng quá lạnh.
- Không dùng quá nóng.
- Không cho vào nhà vệ sinh sau khi sử dụng.
- Nếu mỗi túi khăn đã mở để sử dụng không hết có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Túi khăn chưa mở, bảo quản ở nhiệt độ thường.

#### **5. BẢO QUẢN**

- Để xa tầm tay trẻ em
- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát dưới 30 độ C.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

#### **6. HẠN SỬ DỤNG**

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Hà Nội, Ngày 03 tháng 7 năm 2022

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Dặng Thế Quang*