

BÀN MỒ ĐIỆN ĐA NĂNG

Model: JS-002

Hãng sản xuất: JINSOL MEDICAL INSTRUMENT CO.,

Nước sản xuất: Hàn Quốc



1. Mục đích sử dụng

Bàn mổ JS-002 sử dụng để nâng đỡ bệnh nhân trong phẫu thuật.

Là bàn mổ đa năng, có thể sử dụng cho: sản phụ khoa, chỉnh hình, phẫu thuật, da liễu, tiết niệu, nha khoa.

2. Thông số kỹ thuật

Hệ thống thủy lực.

Phần lưng ghế và phần ghế ngồi có thể quay 35° , phần thân có thể quay 90° . Phần lưng ghế có thể nâng lên đến 75°

Kích thước bàn 1900 mm x 480 mm (Dài x Rộng)

Trọng lượng: 170 kg

Chiều cao có thể điều chỉnh: Tối thiểu 720 mm – Tối Đa 970mm

Nguồn điện: AC 220V

3. Hướng dẫn sử dụng

Sử dụng hệ thống thủy lực và bàn đạp chân để:

- Điều chỉnh được chiều cao 720-970 mm



· Height Adjustable : 970mm up / 720mm down

- Nghiêng trước/sau (Trendelenburg): 25°



· Trendelenburg / Reverse Position : 25 ° up / down

- Phần chân: Có thể hạ xuống 80°
- Phần lưng có thể hạn xuống -30°



· Leg Section Reflection : 80 ° down
· Back Section Reflection : -30 ° up / down

- Vị trí mổ thận: 160°



· Kidney Position : 160° ·

- Nghiêng sang bên: 20°



· Lateral Tilt Position : 20° ·

4. Cảnh báo và thận trọng

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Đỡ xa tầm tay trẻ em.

Không sử dụng vượt quá trọng tải của bàn.

Khi sử dụng phải đảm bảo các chốt ở đúng vị trí, tránh gây mất an toàn. Kỹ thuật viên sử dụng phía được đào tạo, hướng dẫn cách sử dụng thành thạo. Mọi thông tin chi tiết về bảo dưỡng và sửa chữa trang thiết bị xin vui lòng xem sách Hướng dẫn sử dụng kèm theo.