

ĐÈN MÔ (ĐÈN CHỐNG LÓA)

Model: JS-009 (L)

Hãng sản xuất: JINSOL MEDICAL INSTRUMENT CO.,

Nước sản xuất: Hàn Quốc

1. **Mục đích sử dụng:** Sử dụng để chiếu sáng trong thăm khám và phẫu thuật tại sản phụ khoa, chỉnh hình, phẫu thuật, da liễu, tiết niệu và nha khoa.

2. Thông số kỹ thuật

Đèn mô chiếu sáng phẫu thuật LED 5+6 bóng, có thiết kế đơn giản và dễ dàng vận hành.

Đường kính khuôn hình: Chính 680mm(Ø) + phụ 560mm(Ø)

Độ sáng: 120,000Lux + 100,000Lux

Nguồn điện: AC 220V

Bóng đèn: 40W+48W

Tuổi thọ của bóng đèn: 30.000 giờ

Cân nặng: 45kg


Chiều cao tối thiểu: 2,500mm

3. Hướng dẫn sử dụng

3.1 Chuẩn bị trước khi sử dụng

1. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.
2. Xác nhận dây cắm điện đã được cắm vào ổ điện (nguồn điện: 220V)
3. Bật nút nguồn trên bộ điều khiển và nhấn kiểm tra các chức năng của đèn.

3.2 Cách sử dụng

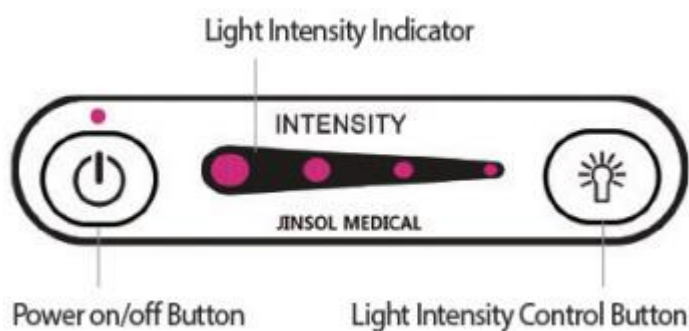

1. Nhấn nút “ON” để bật công tắc nguồn trên bộ điều khiển

2. Hướng đèn theo hướng cần thiết theo hướng trên bảng điều khiển.
3. Điều chỉnh độ sáng của đèn bằng công tắc điều khiển độ sáng (Light intensity control button).
4. Sử dụng tay cầm điều khiển để tập trung cường độ ánh sáng.
5. Nhấn nút “OFF” để tắt công tắc nguồn trên bộ điều khiển.

3.3 Sau khi sử dụng và bảo trì

1. Vệ sinh sạch sẽ mặt kính sau khi sử dụng, sử dụng khăn khô có kết cấu mềm để lau vỏ bảo vệ của vỏ đèn.
2. Làm sạch: vì bụi có thể tích tụ trên bề mặt của vỏ đèn, hãy sử dụng khăn ướt để làm sạch bụi.

4. Cảnh báo và thận trọng

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Đề xa tầm tay trẻ em.

Kỹ thuật viên sử dụng phải được đào tạo, hướng dẫn cách sử dụng thành thạo.

Mọi thông tin chi tiết về bảo dưỡng và sửa chữa trang thiết bị xin vui lòng xem sách hướng dẫn sử dụng kèm theo.