

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế: Công Ty TNHH Đầu Tư Giải Pháp Công Nghệ

Địa chỉ: A44 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP HCM

Ngày tháng năm 2021

Tên trang thiết bị y tế: Đĩa dùng để thao tác mẫu

Tên thương mại: Culture Dish

Chuẩn loại / mã sản phẩm : 16001, 16002, 16003, 16004, 16005, 16006, 16007

Hãng sản xuất: HertART Aps

Nước sản xuất: HertART Aps

Hướng dẫn sử dụng:

Làm theo các thao tác sau:

Bước 1: Xé mỗi hàn và mở đóng gói

Bước 2: Dùng thao tác vô trùng không chạm, đẩy nhẹ số lượng đĩa nuôi cấy ra khỏi đóng gói

Bước 3: Chạm vào vị trí quy định của số lượng đĩa nuôi cấy này để lấy chúng ra khỏi đóng gói


Bước 4: Dùng bút lông ghi hoặc dán nhãn thông tin của bệnh nhân lên mặt và đáy đĩa

Bước 5: Hút lượng môi trường cần thiết vào đĩa tùy mục đích sử dụng

Đĩa được thiết kế với một khoảng cạnh trống phía cạnh dưới của đĩa tách biệt với khu vực xử lý mẫu, dùng để ghi tên, dán nhãn, mã vạch của bệnh nhân... đảm bảo nhận diện người bệnh chính xác. Ngoài ra thiết kế này kèm với việc khắc số thứ tự giồng lên đĩa giúp người sử dụng dễ dàng định hướng trong thao tác, và tránh nhiễm chéo tốt hơn.

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật các thông tin đã kê khai trên.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

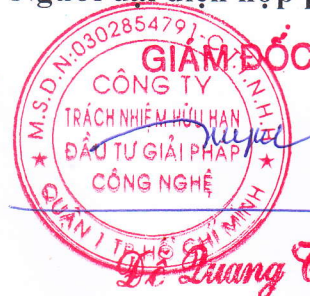

Đ. Quang Tuyên