

# MÁY TRỢ THÍNH MIMITAKARA DP-6B7XX

## TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



### Kiểm tra các thành phần của máy

- Tai nghe khuếch đại âm thanh x 1
- Nụ tai nghe x 2 (size S và L x 1)
- Nụ size S đã gắn sẵn trên thiết bị
- Pin kẽm P13 x 1
- Hộp đựng x 1

### Lắp và thay pin

1. Mở khay pin nhẹ nhàng. Chỉ sử dụng pin tiêu chuẩn theo khuyến cáo của nhà sản xuất (pin kẽm P13).
2. Lắp pin vào đúng vị trí sao cho cực dương (+) của pin hướng ra ngoài.
3. Đóng khay pin lại. Máy trợ thính sẽ mở nguồn tự động sau khi đậy nắp pin.

### Lưu ý

- Nhằm tránh làm hư khay pin, **KHÔNG ĐƯỢC** mở hoặc đóng khay pin mạnh tay.
- Nếu âm thanh đang được điều chỉnh ở mức âm lượng cao nhất mà khó nghe hoặc không nghe thấy âm thanh gì, nghĩa là bạn cần thay pin mới.

### Mở và tắt máy như thế nào?



Lắp pin vào và đóng kín nắp khay pin.




Mở khay pin cho đến khi pin không còn tiếp xúc với cực pin.



### Sử dụng máy trợ thính như thế nào?

1. Máy trợ thính có 2 nụ tai nghe với size khác nhau: size nhỏ (S) và size lớn (L). Vui lòng chọn size phù hợp với tai của bạn.
2. Đặt máy vào tai bạn sao cho phần móc khuếch đại âm thanh nằm phía sau tai.
3. Điều chỉnh âm lượng ở tần số phù hợp. Nếu bạn cảm thấy chói tai, có nghĩa là âm lượng đang quá lớn hoặc máy trợ thính không được đặt đúng cách vào tai bạn. Điều chỉnh vị trí của phần khuếch đại âm thanh hoặc giảm âm lượng từ từ đến khi phù hợp.
4. Tháo máy trợ thính khỏi tai khi bạn sử dụng xong và đặt lại vào hộp đựng. Bảo đảm rằng máy trợ thính đã ở chế độ TẮT (tháo pin) trước khi đặt vào hộp.

Video hướng dẫn chi tiết cách mang thiết bị và những câu hỏi thường gặp xin vui lòng xem thêm tại trang web [www.shopykhoa.com](http://www.shopykhoa.com)

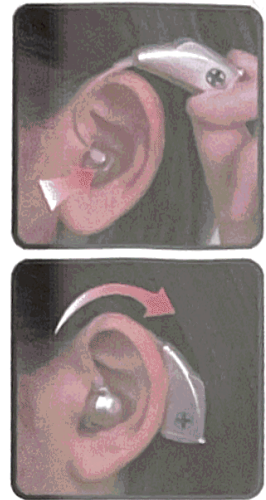

### Thông số kỹ thuật

Loại pin: Pin kẽm P13

Thời gian sử dụng liên tục: lên đến 95 giờ

Mức tăng âm tối đa ở đầu tai nghe:  $29 \pm 5$  dB

Kích cỡ: 35.4 (dài) x 15.6 x 8.7 mm / Trọng lượng: 8g (bao gồm pin)

### Những lưu ý quan trọng

1. Nếu bạn cảm thấy khó chịu khi sử dụng máy trợ thính, vui lòng liên hệ bác sĩ của bạn.
2. Đặt máy trợ thính nhẹ nhàng vào tai sao cho bạn cảm thấy thoải mái.
3. Để bảo đảm vệ sinh, vui lòng không sử dụng chung máy với người khác.
4. Máy trợ thính có những phần nhỏ. Tránh xa khỏi tầm tay trẻ em.
5. Khi tập luyện hoặc chơi các môn thể thao mạnh, vui lòng không đeo máy.
6. Vui lòng không đeo máy khi rửa mặt, khi trời mưa hoặc khi có khả năng sẽ bị ẩm ướt. Và cũng không đeo máy khi ngủ.
7. Tháo máy trợ thính khi đang sử dụng điện thoại.
8. Mở khay pin (chuyển sang "tắt" máy) khi bạn không sử dụng và đặt lại vào hộp đựng, đóng nắp hộp. Điều này sẽ giúp tiết kiệm pin và tăng tuổi thọ của pin.
9. Nếu bạn đang mang bất kỳ thiết bị điện tử nào, ví dụ như máy tạo nhịp tim, v.v., bạn PHẢI được sự chấp thuận của bác sĩ trước khi sử dụng máy trợ thính.
10. Bảo quản máy trợ thính ở nơi thoáng mát, tránh xa ánh sáng mặt trời trực tiếp và những nơi có độ ẩm cao.



Người đại diện hợp pháp của công ty  
Giám đốc



NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG