

MÁY TRỢ THÍNH MIMITAKARA UP-6SZX


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Danh sách phụ kiện



- ①Bút sạc di động ②Đèn báo sạc ③Đèn báo pin
④Bộ chuyển điện ⑤Nút trạng thái ⑥Pin kiềm AA
⑦Bàn chải làm sạch ⑧Nụ tai nghe (1S, 1L)

Sơ đồ vận hành

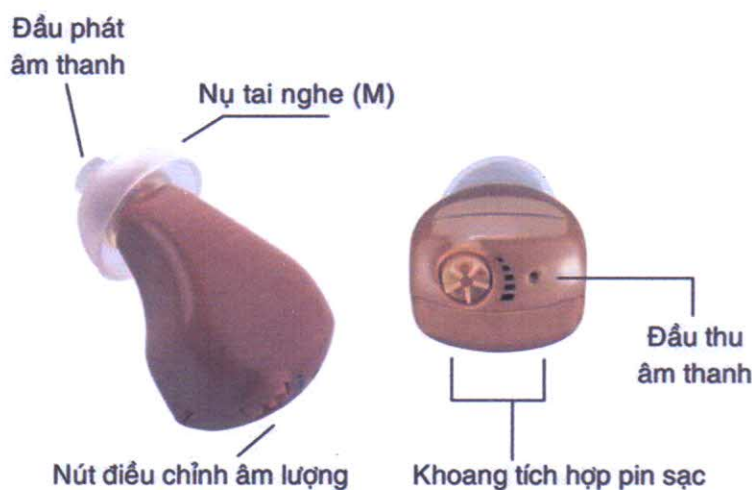

Cách sử dụng

LƯU Ý: Trước khi sử dụng máy trợ thính, hãy đảm bảo rằng pin đã được sạc đầy.


Bước 1: MỞ máy sẵn trước khi đặt máy vào tai.

Bước 2: Máy sẽ mở khi bạn xoay nút âm lượng theo chiều kim đồng hồ, mà máy sẽ tắt khi bạn chỉnh âm lượng về mức thấp nhất. Vui lòng tắt máy khi bạn sử dụng xong.



Bước 3: Sử dụng ngón tay của bạn để che lỗ thu nhận âm thanh, sau đó nhẹ nhàng đưa máy vào bên




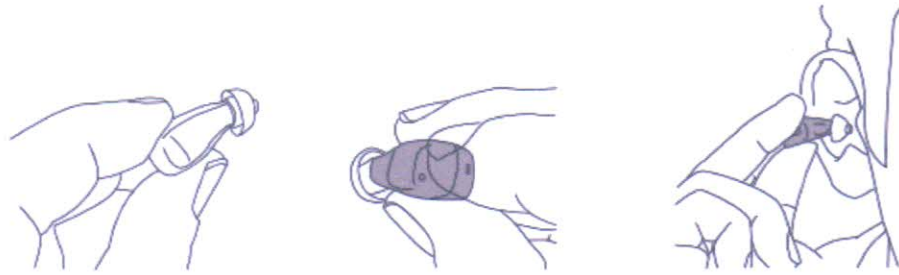

Bạn sẽ nghe thấy tiếng ù của máy nếu bạn không bịt đầu âm thanh khi đặt máy vào tai.

Bước 4: Xoay nút điều chỉnh âm lượng để phù hợp nhất với bạn có thể. Quay theo chiều kim đồng hồ để tăng - giảm âm lượng.

Hướng dẫn sạc pin

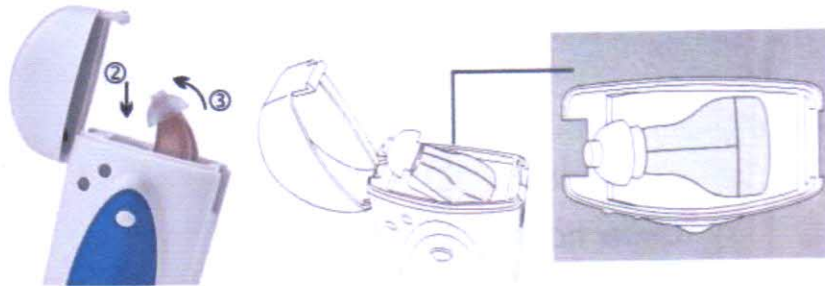

1. Đặt máy vào bút sạc, theo chiều thẳng đứng.
2. Nhẹ nhàng đẩy máy nằm xuống trong bút sạc như hình.
3. Đóng nắp bút sạc khi máy đã nằm đúng vị trí.

Lưu ý: nếu máy trợ thính không được đặt đúng vị trí trong bút sạc, máy sẽ không được sạc pin.


Sạc bằng pin 2A

1. Lắp pin 2A vào khay để pin.
2. Nhấn nút trạng thái. Đèn báo pin và đèn báo sạc bật màu XANH LÁ.
3. Vui lòng sạc ít nhất 7 giờ cho mỗi lần sạc.




Sạc bằng điện (AC Adapter)

1. Kết nối dây sạc với khe trên máy
2. Nhấn nút trạng thái. Đèn báo pin và đèn báo sạc bật màu XANH LÁ.
3. Vui lòng sạc ít nhất 7 giờ cho mỗi lần sạc.

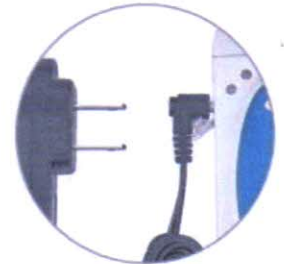

Đèn báo chỉ thị

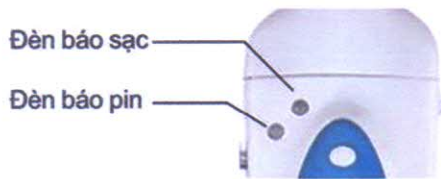


| | | |
|--------------------------------|-----------|--|
| Tình trạng đèn báo | XANH LÁ | Máy trợ thính đang sạc bình thường. |
| | OFF / TẮT | Máy đã được sạc đầy. Hoặc máy lắp vào khay sạc chưa chính xác. |
| Tình trạng pin, bộ chuyển điện | XANH LÁ | Nguồn sạc bình thường |
| | ĐỎ | Pin 2A yếu (lắp pin mới hoặc sử dụng nguồn điện) |
| | OFF / TẮT | Không có nguồn (lắp pin 2A mới hoặc sử dụng nguồn điện) |

Trước và sau mỗi lần sử dụng

Vui lòng vệ sinh tai trước khi sử dụng, lau sạch tai bằng tăm bông. Nếu tai trong bị bít tắc do ráy tai, chất lượng âm thanh sẽ bị giảm.



Vui lòng thường xuyên làm sạch ráy tai trong máy trợ thính bằng chổi làm sạch, đặc biệt chú ý đến vòi của nụ tai nghe có thể bị dính ráy tai.

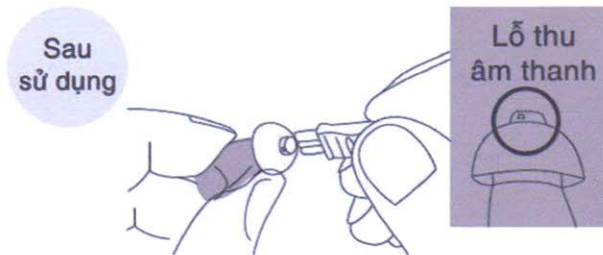

Vệ sinh nụ tai nghe bằng chổi làm sạch như hình hướng dẫn bên trên.

Cảnh báo

- Để kéo dài tuổi thọ của pin sạc, hãy sạc đầy máy trợ thính và sau đó tắt khi không sử dụng trong một thời gian dài.
- Giữ sạch cả tai và máy trợ thính, đảm bảo không có ráy tai.
- Nếu sử dụng đúng cách, pin sạc có thể kéo dài tuổi thọ lên đến 500 lần sạc.
- Khi pin sạc yếu, âm thanh của máy trợ thính sẽ bị giảm. Điều này có nghĩa là máy cần sạc pin.
- Giữ máy trợ thính tránh xa tầm tay của trẻ sơ sinh, trẻ em và vật nuôi.
- Trước khi sử dụng máy lần đầu, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để đảm bảo vận hành, chăm sóc và xử lý máy trợ thính đúng cách.
- KHÔNG sử dụng sản phẩm này trong các điều kiện sau: đang nghe điện thoại, ngủ, tắm, gội đầu / rửa mặt, bơi lội hoặc bất kỳ động tác mạnh nào để tránh làm hỏng máy trợ thính.

Lưu ý quan trọng

Nhằm kéo dài tuổi thọ của pin sạc, chúng tôi khuyến cáo khách hàng nên sạc máy trợ thính ngay cả khi không sử dụng máy.

1.Xin chú ý: Máy trợ thính loại pin sạc, nếu không được sử dụng trong thời gian dài, sẽ khiến cho pin bị chai, bạn nên sạc duy trì mỗi 2 tuần để tăng khả năng nạp, xả của pin và kéo dài tuổi thọ của pin. Số lần sạc pin có thể lên đến 500 lần.

2.Theo đặc điểm của pin sạc, khi hết pin, chất lượng âm thanh của máy trợ thính sẽ giảm. Vui lòng sạc pin lại bằng điện hoặc pin 2A.

Người đại diện hợp pháp của công ty
Giám đốc

