

MÁY TRỢ THÍNH MIMITAKARA UP-6SXX


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Danh sách phụ kiện



- ①Hộp sạc di động ②Máy trợ thính ③Nụ tai nghe
④Chổi quét vệ sinh ⑤Bộ chuyển điện AC

Sơ đồ vận hành

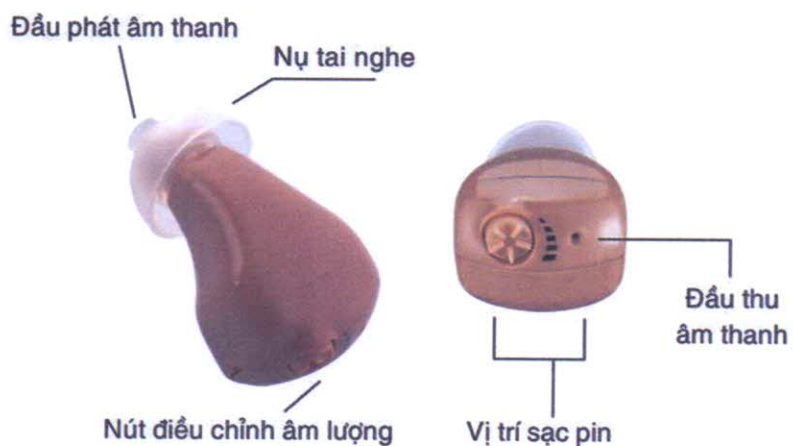

Hộp sạc di động




Lưu ý: Trước khi sử dụng máy trợ thính, đảm bảo rằng máy đã được sạc pin đầy đủ.

Bước 1: Vận nút ON bằng cách xoay nút điều chỉnh âm lượng theo chiều kim đồng hồ.



Bước 2: Kiểm tra máy trợ thính để đảm bảo rằng nẹp tai nghe silicone đã được gắn chắc chắn.

Bước 3: Sử dụng ngón tay của bạn để che lỗ thu nhận âm thanh, sau đó nhẹ nhàng đưa máy trợ thính vào bên trong tai của bạn.

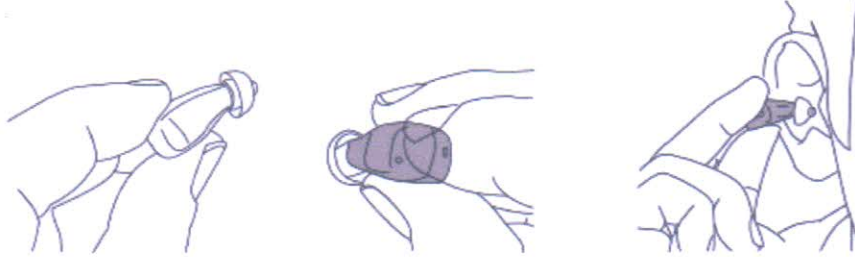

Bước 4: Xoay nút âm lượng để điều chỉnh mức độ nghe phù hợp nhất với bạn. Xoay theo chiều kim đồng hồ để tăng âm lượng và ngược chiều kim đồng hồ để giảm âm lượng.

Hướng dẫn sạc pin

Có 2 cách để sạc pin cho máy trợ thính: Sạc bằng pin hoặc sạc bằng điện.

Hướng dẫn sạc máy trợ thính:


Bước 1: Kiểm tra chắc chắn máy trợ thính đã được MỞ (xoay nút điều chỉnh âm lượng để tăng âm lượng, lưu ý không để âm lượng ở mức thấp hoặc tắt).

Bước 2: Đặt máy trợ thính vào khay sạc ở tư thế thẳng đứng như hình 1.

Bước 3: Đẩy nhẹ nhàng để máy trợ thính nằm xuống trong khay sạc như hình 2.



Bước 4: Đặt pin 3A vào khay pin hoặc kết nối với dây sạc điện để bắt đầu sạc máy trợ thính.

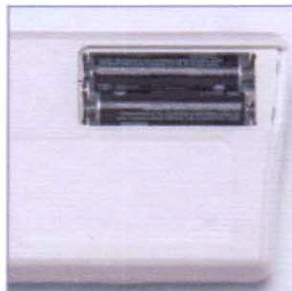

Bước 5: Bảo đảm đèn LED ban đêm sáng và máy trợ thính được đặt đúng vị trí trong khay sạc.

Quan sát tình trạng đèn báo để chắc chắn máy trợ thính đang được sạc bình thường.

Đậy nắp hộp sạc để bảo vệ máy trợ thính khỏi bụi bẩn và hư hỏng.




Đèn báo chỉ thị

Tình trạng đèn báo	XANH LÁ	Máy trợ thính đang sạc bình thường.
	OFF / TẮT	Máy đã được sạc đầy. Hoặc máy lắp vào khay sạc chưa chính xác.
Tình trạng pin, bộ chuyển điện	XANH LÁ	Nguồn sạc bình thường
	ĐỎ	Pin 3A yếu (lắp pin mới hoặc sử dụng nguồn điện)
	OFF / TẮT	Không có nguồn (lắp pin 3A mới hoặc sử dụng nguồn điện)

Cách thay nệm tai nghe silicone


Bước 1: Nhẹ nhàng lật ngược và kéo nệm tai nghe ra khỏi máy trợ thính. Bạn sẽ thấy đầu trục ở vị trí gắn nệm tai nghe.

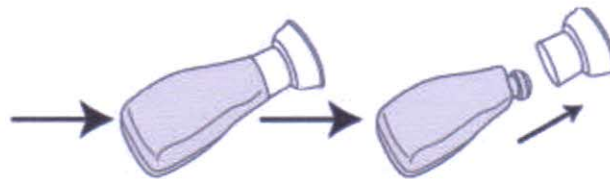

Bước 2: Chọn nệm tai nghe mới. Nhẹ nhàng lật ngược nệm tai nghe lại.




Bước 3: Đặt nệm tai mới vào đầu trục, điều chỉnh sao cho lỗ của nệm tai nghe ở vị trí trung tâm của trục và nhẹ nhàng đẩy vào cho đến khi nệm tai được gắn hoàn toàn vào trục.

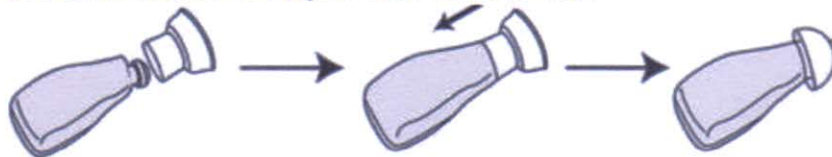


Trước và sau mỗi lần sử dụng

Vui lòng vệ sinh tai trước khi sử dụng, lau sạch tai bằng tăm bông. Nếu tai trong bị bít tắc do ráy tai, chất lượng âm thanh sẽ bị giảm.

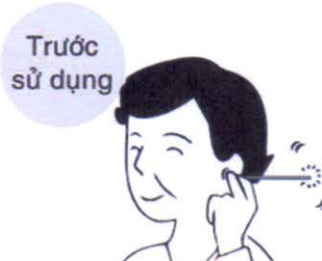

047332
CÔNG TY
PHÂN
BỘ Y TẾ
HÀNG
HỒ CH

Vui lòng thường xuyên làm sạch ráy tai trong máy trợ thính bằng chổi làm sạch, đặc biệt chú ý đến vòi của nụ tai nghe có thể bị dính ráy tai.

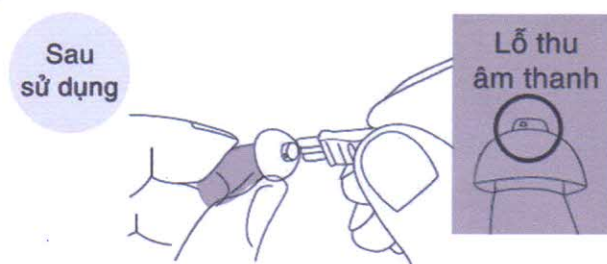

Vệ sinh nụ tai nghe bằng chổi làm sạch như hình hướng dẫn bên trên.

Hướng dẫn bảo quản pin

- Khi pin gần cạn, sẽ có âm thanh báo cho bạn biết là năng lượng pin đang thấp và máy cần được sạc.
- Một lần sạc đầy mất 8-12 giờ, và cho phép sử dụng máy lên đến 6-10 giờ.
- Pin sạc được thiết kế lên đến 500 lần sạc. Sau đó, pin cần được thay và/hoặc máy trợ thính cần được thay mới. Nếu sử dụng và bảo quản máy đúng, tuổi thọ pin sạc có thể lên đến 1000 lần sạc.
- Để tăng tuổi thọ pin, nên sạc duy trì 2 lần/tuần nếu bạn không sử dụng máy trong thời gian dài.
- Đảm bảo bạn đã mở máy ở chế độ ON/MỞ trước khi sạc.

- Để tăng tuổi thọ pin, nên sạc đầy và tắt máy trợ thính khi không sử dụng trong thời gian dài.
- Giữ vệ sinh sạch sẽ cả 2 tai và máy trợ thính, không để bị tắc do ráy tai.
- Nếu sử dụng và bảo quản máy đúng, tuổi thọ pin sạc có thể lên đến 1000 lần sạc.
- Khi năng lượng pin thấp, âm thanh sẽ nhỏ hơn và bạn cần sạc pin.
- Giữ máy trợ thính tránh xa khỏi tầm tay trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và thú nuôi.
- Khi sử dụng lần đầu tiên, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để nắm đầy đủ các thông tin cần thiết.
- KHÔNG SỬ DỤNG MÁY TRỢ THÍNH trong những điều kiện sau: điện thoại di động, ngủ, tắm, gội đầu hoặc rửa mặt, bơi lội hoặc khi chơi thể thao gắng sức nhằm tránh làm hư hại máy.

Cảnh báo

- Nên tuân theo hướng dẫn sử dụng nhằm tránh ảnh hưởng đến người dùng và tránh hư hại thiết bị.
- Thiết bị trợ thính nên để xa tầm tay trẻ em.
- Tháo thiết bị trước khi ngủ.
- Tháo thiết bị trước khi tập luyện thể thao mạnh để tránh hư hại máy.
- Tháo thiết bị trước khi sử dụng điện thoại di động vì sóng radio sẽ gây nhiễu thiết bị trợ thính.
- Thiết bị trợ thính phải được giữ khô ráo. Không làm ẩm thiết bị, không sử dụng nước xịt tóc khi mang thiết bị. Tháo thiết bị trước khi tắm gội.

Ghi chú: Vui lòng bỏ thiết bị trợ thính và pin một cách an toàn.

Người đại diện hợp pháp của công ty
Giám đốc

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIẾT BỊ Y TẾ
ÂU CHÂU

QUẬN 1 - TP. HCM

NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG

MÁY TRỢ THÍNH MIMITAKARA UP-6SZX


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Danh sách phụ kiện



- ①Bút sạc di động ②Đèn báo sạc ③Đèn báo pin
④Bộ chuyển điện ⑤Nút trạng thái ⑥Pin kiềm AA
⑦Bàn chải làm sạch ⑧Nụ tai nghe (1S, 1L)

Sơ đồ vận hành

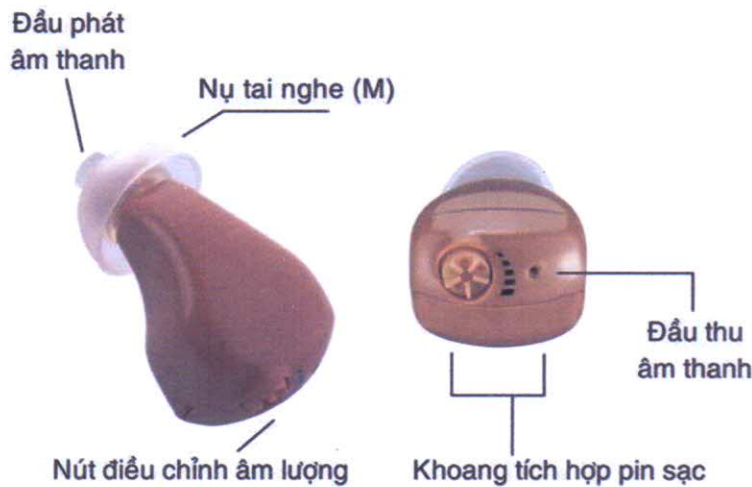

Cách sử dụng

LƯU Ý: Trước khi sử dụng máy trợ thính, hãy đảm bảo rằng pin đã được sạc đầy.

Bước 1: MỞ máy sẵn trước khi đặt máy vào tai.

Bước 2: Máy sẽ mở khi bạn xoay nút âm lượng theo chiều kim đồng hồ, mà máy sẽ tắt khi bạn chỉnh âm lượng về mức thấp nhất. Vui lòng tắt máy khi bạn sử dụng xong.



Bước 3: Sử dụng ngón tay của bạn để che lỗ thu nhận âm thanh, sau đó nhẹ nhàng đưa máy vào bên



