

MÁY TRỢ THÍNH MIMITAKARA UP-6S42 / UP-6S43

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Thông tin sản phẩm

- Mã sản phẩm UP-6S42: Máy trợ thính dùng cho tai phải
- Mã sản phẩm UP-6S43: Máy trợ thính dùng cho tai trái

Danh sách phụ kiện

- Hộp đựng thiết bị trợ thính x1
- Nụ tai nghe silicone (size S và M) x2
- Chổi từ tính làm sạch x1
- Thiết bị chính có gắn sẵn nụ tai nghe x1
- Pin máy trợ thính x1




Mô tả sản phẩm



Hướng dẫn sử dụng điện thoại khi đang mang máy trợ thính

CÁCH SỬ DỤNG MÁY TRỢ THÍNH KHI NGHE ĐIỆN THOẠI


MÁY TRỢ THÍNH LỖ TAI



MICRO THU ÂM THANH

Micro thu âm thanh đang ở trong tai
Hãy đặt điện thoại gần micro thu âm thanh của máy trợ thính
Bạn sẽ nghe rõ được âm thanh

MÁY TRỢ THÍNH VÀNH TAI




MICRO THU ÂM THANH

Micro thu âm thanh đang ở phía ngoài, bên trên vành tai
Hãy đặt điện thoại bên ngoài tai, gần micro thu âm thanh của máy trợ thính
Bạn sẽ nghe rõ được âm thanh

Hướng dẫn sử dụng chổi làm sạch

CHỔI LÀM SẠCH



Bàn chải để làm sạch thiết bị

Vòng làm sạch

Nam châm

Lông bàn chải chất liệu từ tính
Sử dụng chổi làm sạch từ tính khi lắp pin và vệ sinh thiết bị. Dễ dàng hơn khi thay pin.

Dùng giữ pin và đặt pin vào khay đựng pin.

Dùng làm sạch các chi tiết của nút silicone hoặc dùng hỗ trợ lấy pin ra khỏi khay.

3109
CÔNG
CỔ P
HIẾT B
U C
TP. H

Hướng dẫn sử dụng máy trợ thính



Chọn máy trợ thính cho tai trái (L) / tai phải (R) khi mua.
Khi đeo vào lỗ tai, luôn giữ cho mũi tên hướng lên trên.



Hình ảnh mang máy trợ thính đúng.




Khi nào bạn muốn lấy máy trợ thính ra, hãy kéo từ từ dây tháo dỡ và nhẹ nhàng lấy máy ra khỏi ống tai



Hướng dẫn thay pin

Thay pin đơn giản chỉ với 3 bước như sau:

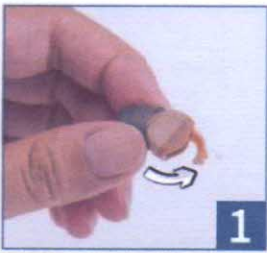

Bước 1: Mở nắp khay đựng pin




Bước 2: Giữ pin bằng đầu nam châm của chốt từ tính, tại vị trí cực dương (+)



Bước 3: Đặt pin vào khay đựng pin, sao cho cực dương (+) hướng lên trên

47337-0
CÔNG TY
HÀN
Y TẾ
HÀU
ĐỒ CHỈ V

Hướng dẫn thay nệm tai nghe silicone

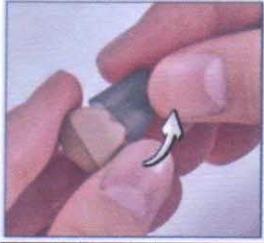

Dùng ngón tay bóp nhẹ đầu nệm tai nghe và lấy nệm tai nghe ra.
Gắn nệm tai nghe mới vào.



Khi nệm tai nghe được gắn vào đúng vị trí bạn sẽ nghe tiếng lách cách.



Sử dụng chổi từ tính để làm sạch ráy tai trên thiết bị hoặc dùng đầu que nhọn của chổi để làm sạch lỗ tai nghe.

Người đại diện hợp pháp của công ty
Giám đốc



NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG

