

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế : **CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NARO PHARMA VIỆT NAM.**

Địa chỉ: Lầu 1, Số 20 Trần Quốc Hoàn, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 22 tháng 07 năm 2022

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trang thiết bị y tế: Dung dịch xịt cho nam

Chủng loại: Super Hard

1. Chủ sở hữu trang thiết bị y tế: Thanh Nien Media Corporation

Địa chỉ tại: **3565 Seven Hills Road, Castro Valley, California 94546, USA**

2. Hướng dẫn sử dụng:

- Mỗi lần xịt từ 1-3 lần nhần, xịt trực tiếp vào đầu trên và phần gân phía dưới đầu dương vật khi cương cứng trước 5-10 phút trong quan hệ
- Dùng không quá 3 lần/ngày
- Có thể sử dụng kết hợp với bao cao su, gel bôi trơn bình thường
- Có thể sử dụng khăn mềm để lau hoặc rửa bằng nước mà không mất tác dụng vốn có

3. Chỉ định sử dụng:

dành cho nam giới đang bị yếu sinh lý xuất tinh sớm, nam giới có thời gian quan hệ dưới 10 phút, nam giới muốn cải thiện đời sống vợ chồng.

4. Cảnh báo và thận trọng:

- Không sử dụng trên vùng da bị tổn thương hoặc bong.
- Không sử dụng khi đối phương của bạn đang mang thai.
- Tránh tiếp xúc bằng mắt.
- Không sử dụng quá 8 lần xịt trong 24 giờ.
- Trước và sau khi sử dụng bạn cần rửa sạch sẽ dương vật để hạn chế tối đa tình trạng viêm nhiễm



- Đọc kỹ hướng dẫn, sử dụng đúng cách, đúng liều lượng từ nhà sản xuất
- Hạn chế sử dụng chất kích thích như rượu bia, thuốc lá trong quá trình sử dụng.
- Bạn có thể bao cao su để kéo dài thời gian quan hệ, tăng khoái cảm

5. Bảo quản:

Bảo quản chai xịt ở nơi khô ráo, thoáng mát, để xa tầm tay trẻ em.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC
Lâm Thị Ngọc Dung

