


# MÁY TRỢ THÍNH MIMITAKARA UP-6EKX

## TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


### Danh sách phụ kiện

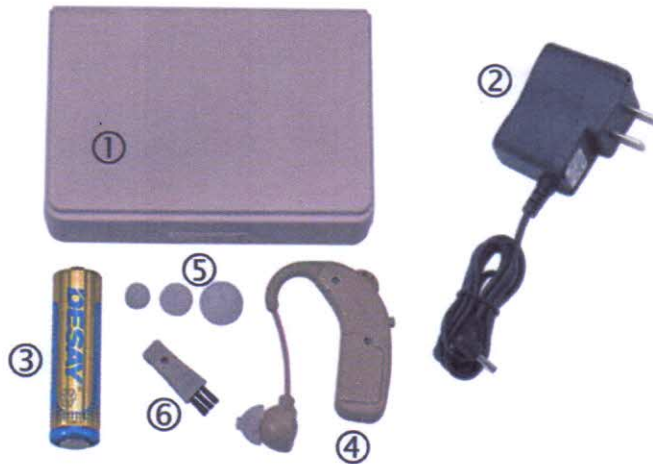

- ① Hộp sạc di động ② Bộ chuyển điện ③ Pin kiềm 2A  
 ④ Máy trợ thính ⑤ Nụ tai nghe (1L, 1M, 1S, 1 mini)  
 ⑥ Chổi làm sạch

### Sơ đồ vận hành

#### Hộp sạc di động

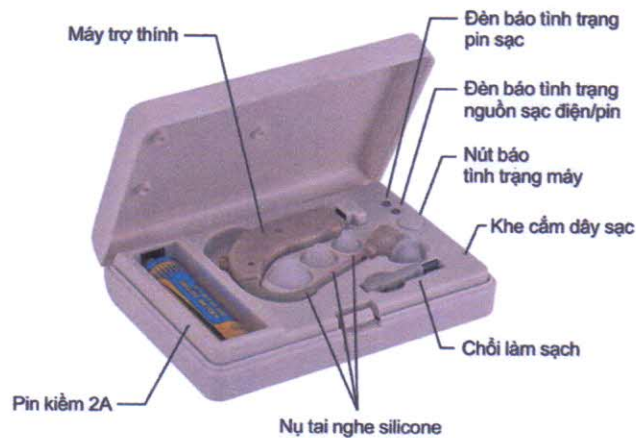

#### Máy trợ thính UP-6EKX



### Cài đặt chế độ ON / OFF / NF

1. OFF: Tắt nguồn



3. NF (Noise-free: Khử ồn): Loại bỏ các tiếng ồn tần số thấp.

31  
CÓ  
CÓ  
THIẾ  
ÂU  
-T-

## Hướng dẫn sạc pin

### Sạc bằng pin 2A

1. Lắp pin 2A vào khay để pin.
2. Nhấn nút trạng thái. Đèn báo pin và đèn báo sạc bật màu XANH LÁ.
3. Vui lòng sạc ít nhất 7 giờ cho mỗi lần sạc.



### Sạc bằng điện (dùng bộ chuyển điện AC Adapter)

1. Kết nối bộ sạc AC.
2. Nhấn nút trạng thái. Hãy kiểm tra xem hai đèn báo sạc và báo pin đã bật XANH LÁ chưa.
3. Vui lòng sạc ít nhất là 5 giờ mỗi lần sạc.



## Đèn báo chỉ thị



Tình trạng đèn báo	XANH LÁ	Máy trợ thính đang sạc bình thường.
	OFF / TẮT	Máy đã được sạc đầy. Hoặc máy lắp vào khay sạc chưa chính xác.
Tình trạng pin, bộ chuyển điện	XANH LÁ	Nguồn sạc bình thường
	ĐỎ	Pin 2A yếu (lắp pin mới hoặc sử dụng nguồn điện)
	OFF / TẮT	Không có nguồn (lắp pin 2A mới hoặc sử dụng nguồn điện)

## Trước và sau mỗi lần sử dụng


Vui lòng vệ sinh tai trước khi sử dụng, lau sạch tai bằng tấm bông. Nếu tai trong bị bít tắc do ráy tai, chất lượng âm thanh sẽ bị giảm.

Trước  
sử dụng



Vui lòng thường xuyên làm sạch ráy tai trong máy trợ thính bằng chổi làm sạch, đặc biệt chú ý đến vòi của nụ tai nghe có thể bị dính ráy tai.

Sau  
sử dụng

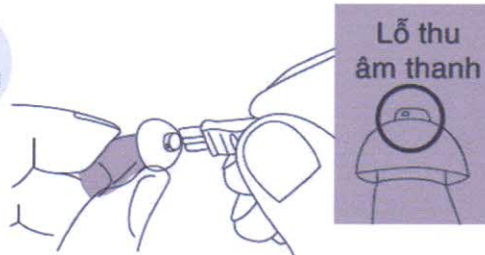

Vệ sinh nụ tai nghe bằng chổi làm sạch như hình hướng dẫn bên trên.

### Hướng dẫn sử dụng

Chú ý: Có độ trễ khoảng 10 giây để máy trợ thính loại bỏ tạp âm khi sử dụng.




1 Đeo máy trợ thính vào tai đúng cách.



2 Đặt nụ tai nghe sao cho vừa vặn với ống tai.



3 Bật nút ON hoặc chỉnh chế độ NF. Nếu nghe tiếng ù bạn đổi sang nụ tai lớn hơn.

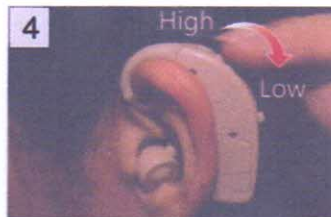

4 Xoay nút vặn điều chỉnh âm lượng để chọn mức âm lượng thích hợp.

**Lưu ý:** Khi tháo máy ra khỏi tai, phải nắm phần thân máy và tháo theo thứ tự từ sau ra trước để tránh làm ảnh hưởng và bị đứt dây tai nghe.

### Cảnh báo

- Để kéo dài tuổi thọ của pin sạc, hãy sạc đầy máy trợ thính và sau đó tắt khi không sử dụng trong một thời gian dài.
- Giữ sạch cả tai và máy trợ thính, đảm bảo không có ráy tai.
- Nếu sử dụng đúng cách, pin sạc có thể kéo dài tuổi thọ lên đến 500 lần sạc.
- Khi pin sạc yếu, âm thanh của máy trợ thính sẽ bị giảm. Điều này có nghĩa là máy cần sạc pin.
- Giữ máy trợ thính tránh xa tầm tay của trẻ sơ sinh, trẻ em và vật nuôi.

