




# Invia® Motion™ Thẻ hướng dẫn nhanh



Sạc đầy pin lần đầu tiên trước khi bắt đầu trị liệu. Thời gian sạc có thể lên đến 4 giờ.  
Sạc lại pin trong suốt thời gian trị liệu. Thời lượng pin dự kiến thường vượt quá 10 giờ.

## Tổng quan

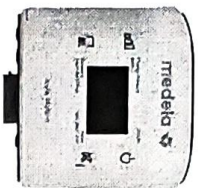


Chỉ bác sĩ / nhân viên y tế sử dụng




## Định vị và đeo máy bơm trị liệu vết thương áp lực âm Invia Motion (NPWT)



Thẳng đứng

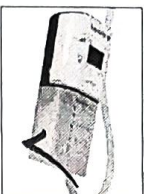

Nằm với màn hình ngược lên

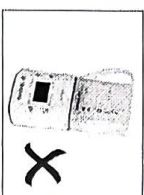

Đốc ngược



Nằm với màn hình up xuống



Đeo vai





Đeo thất lưng


Nếu được đặt ở vị trí không thích hợp hoặc khi ống đựng đầy, thông báo “Ống đựng đầy” sẽ xuất hiện và bộ ống / ống đựng Invia Motion phải được thay đổi để tiếp tục trị liệu.

## Thông tin trên màn hình


| Biểu tượng | Mô tả   |
|------------|---|
|            | Máy bơm đang chạy /Trạng thái bật ở chế độ gián đoạn (Biểu tượng nhấp nháy)   |
|            | Chế độ không đổi  |
|            | Cài đặt áp suất âm tĩnh bằng mmHg   |
|            | Mức sạc pin (kỳ hiệu ổn định) Sạc pin (thanh di chuyển)   |
|            | Trạng thái tắt ở chế độ ngắt quãng (Biểu tượng đang nhấp nháy)  |
|            | Chế độ gián đoạn  |
|            | Pin đã được sạc đầy   |
|            | Thông tin thời gian đã sử dụng - hiển thị thời gian chạy đã được sử dụng ngày (tt) và giờ (:) (Vị dụ đối với máy bơm đã hoạt động trong 6 ngày và 23 giờ). Không áp dụng cho Invia Motion Endure... |

## Thay đổi bộ ống / hộp Invia Motion



- Tin hiệu âm thanh bị tắt bằng cách nhấn nút .
- Rửa tay và chuẩn bị khăn giấy hoặc khăn giấy sạch.
- 2 Thao máy bơm Invia Motion NPWT khởi hộp đựng. Tất máy bơm Invia Motion NPWT bằng cách nhấn và giữ nút  trong 3 giây. Nhấn một lần duy nhất.
- Đặt kẹp bên cạnh đầu kết nối nhanh và đóng kẹp trên ống.
 








Kẹp mở






Kẹp đóng
- Ngắt kết nối ống bơm Invia Motion NPWT khỏi ống bằng cách nhấn vào các mặt của đầu nối nhanh. Dùng giấy hoặc khăn để che đầu ống đã sử dụng để bảo vệ khỏi rò rỉ dịch vết thương.
 



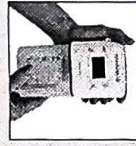








- Tháo bộ hộp / ống dây đủ bằng cách xoay hộp sang trái.
 




- Rửa tay.
- Nhận và mở gói bộ ống / hộp Invia Motion.
  - Không sử dụng bộ hộp / ống Invia Motion nếu bao bì tiết trùng bị hỏng hoặc đã hết hạn sử dụng.
  - Đảm bảo sử dụng đúng ống đựng; Ref: 087, 4016.
  - Liên hệ với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn nếu không có ống đựng chính xác.
- Tháo hộp / bộ ống ra khỏi bao bì và gắn nó vào máy bơm Invia Motion NPWT.
 



- Kết nối ống bơm Invia Motion NPWT với ống bằng. Gắn cho đến khi bạn nghe thấy tiếng tách.
 



- Mở kẹp trên ống bằng. Đồng thời đảm bảo rằng kẹp trên máy bơm đã mở.
- Bật máy NPWT Invia Motion vào túi đựng. 
- Hãy hỏi bác sĩ của bạn cách vứt bỏ đúng cách một hộp / bộ ống đã qua sử dụng.

## Thông báo

| Biểu tượng  | Nội dung                                | Giải pháp                | Cách giải quyết  |
|---|---|--------------------------|--|
|  | Nhập nháy + âm thanh báo hiệu           | Rò rỉ trong hệ thống     | Kiểm tra hệ thống xem có rò rỉ - tham khảo hướng dẫn sử dụng - chương Thông báo và khắc phục sự cố   |
|  | Nhập nháy + âm thanh báo hiệu           | Tắc nghẽn                | Kiểm tra hệ thống xem có bị tắc nghẽn không - tham khảo hướng dẫn sử dụng - chương Thông báo và khắc phục sự cố  |
|  | Nhập nháy + âm thanh báo hiệu           | Hộp đầy                  | Thay đổi bộ ống / ống đựng Invia Motion - tham khảo mô tả trong chương "Thay đổi bộ ống / ống chuyên động Invia"   |
|  | Nhập nháy + âm thanh báo hiệu           | Pin yếu                  | Kết nối máy bơm Invia Motion với nguồn điện và sạc đầy pin. Thời gian sạc có thể lên đến 4 giờ - tham khảo hướng dẫn sử dụng - chương Thông báo và khắc phục sự cố   |
|    | Nhập nháy + âm thanh báo hiệu           | Pin đã hết hoàn toàn     | Kết nối máy bơm Invia Motion với nguồn điện - tham khảo hướng dẫn sử dụng - chương Thông báo và khắc phục sự cố  |
|    | Nhập nháy + âm thanh báo hiệu           | Thiếu pin                | Đảm bảo rằng nắp ngăn chứa pin được lắp và đóng đúng cách - tham khảo hướng dẫn sử dụng - chương Thông báo và khắc phục sự cố / Thông báo tổng quan  |
|    | Nhập nháy (Ví dụ cho phiên bản 15 ngày) | Thời gian bơm đã hết hạn | Vứt bỏ máy bơm Invia Motion NPWT. Định kèm thiết bị khác nếu cần - tham khảo hướng dẫn sử dụng - chương Thông báo và khắc phục sự cố   |
|    | Âm thanh báo hiệu                       | Lỗi (Lỗi nội bộ)         | Tất máy bơm Invia Motion NPWT bằng cách nhấn nút  và giữ trong 3 giây. Bệnh nhân: liên hệ ngay với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn để được hướng dẫn thêm. Tham khảo hướng dẫn sử dụng - chương Thông báo và khắc phục sự cố / Thông báo tổng quan |

Tin hiệu âm thanh có thể được tắt bằng cách nhấn 

Medela AG  
Lätlichstrasse 4b  
6340 Baar, Switzerland  
www.medelahealthcare.com

USA  
Medela LLC  
1101 Corporate Drive  
Mchenry, IL 60050  
USA  
Phone +1 817 725 1826  
Fax +1 815 307 8942  
info-healthcare@medela.com  
www.medelahealthcare.us

United Kingdom  
Medela UK Ltd.  
Huntman Drive  
Northbank Industrial Park  
Hiam, Manchester M4 5EG  
United Kingdom  
Phone +44 161 776 0400  
Fax +44 161 776 0444  
info@medela.co.uk  
www.medelahealthcare.co.uk

Canada  
Medela Canada Inc.  
4160 Stadelview Crescent, Unit #8  
Mississauga, Ontario, L5L 0A1  
Canada  
Phone +1 905 608 7272  
Fax +1 905 608 8720  
info@medela.ca  
www.medelahealthcare.ca

Switzerland  
Medela AG  
Lätlichstrasse 7  
6340 Baar  
Switzerland  
Phone +41 848 633 352  
Fax +41 41 562 14 42  
contact@medela.ch  
www.medelahealthcare.ch

International Sales  
Medela AG  
Lätlichstrasse 4b  
6340 Baar  
Switzerland  
Phone +41 41 562 51 51  
Fax +41 41 562 51 00  
ism@medela.ch  
www.medelahealthcare.com