

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

# Nước biển sâu XI-FRESH

#### Thành phần

-Loại chai xịt dùng cho người lớn: Natri clorid, Calci clorid dihydrat, Magnesi clorid hexahydrat, Kẽm sulfat heptahydrat, Kali clorid, Kali bromid, Tinh dầu Eucalyptus 60 %, Tinh dầu bạc hà, Benzalkonium clorid, Natri hydroxyd, Nước tinh khiết.

-Loại chai xịt dùng cho trẻ em: Natri clorid, Calci clorid dihydrat, Magnesi clorid hexahydrat, Kẽm sulfat heptahydrat, Kali clorid, Kali bromid, Tinh dầu Eucalyptus 60 %, Benzalkonium clorid, Natri hydroxyd, Nước tinh khiết.

#### Tác dụng

Với công thức nước tương tự nước biển tự nhiên chứa nhiều chất khoáng vi lượng như  $\text{Na}^+$ ,  $\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{Mg}^{2+}$ ,  $\text{K}^+$  ...phù hợp với sinh lý mũi. Ngoài ra, còn bổ sung thêm tinh dầu tự nhiên giúp tạo cảm giác mát dịu. Dung dịch xịt vệ sinh mũi Nước biển sâu XI-FRESH dạng xịt phun sương tạo các hạt nhỏ đi sâu vào hốc mũi giúp đào thải bụi bẩn ra khỏi mũi, làm loãng dịch tiết và đào thải ra ngoài giúp mũi thông thoáng hơn. Vệ sinh niêm mạc mũi hàng ngày khi tiếp xúc với khói bụi, thời tiết hanh khô, thay đổi thời tiết hoặc phòng có máy lạnh... giúp phục hồi độ ẩm tự nhiên cho mũi, làm giảm ho khan, tạo cảm giác sảng khoái... Với hệ thống valve một chiều, có thể ngăn cản sự nhiễm khuẩn trở lại sản phẩm sau mỗi lần xịt.

#### Mục đích sử dụng

Giúp loại bỏ dịch nhầy, gỉ mũi và làm sạch tất cả bụi bẩn ra khỏi mũi, hỗ trợ ngăn ngừa và làm giảm các triệu chứng về đường hô hấp như nghẹt mũi, sổ mũi, viêm mũi dị ứng.

#### Cách sử dụng

Dùng để vệ sinh mũi hàng ngày: 2 - 3 lần mỗi ngày theo các bước sau:

1. Mở nắp bảo vệ theo chiều thẳng đứng.
2. Đặt ngón tay trở lên đầu vòi phun.
3. Đưa nhẹ nhàng vòi phun vào lỗ mũi.
4. Ấn nhanh đầu phun từ 2 đến 3 lần mỗi bên mũi.
5. Để dung dịch dư kéo chất nhầy chảy ra ngoài và hỉ mũi.
6. Lau sạch, khô vòi phun, đậy nắp bảo vệ.

#### Lưu ý

- Sản phẩm *chai xịt dùng cho người lớn* có tinh dầu bạc hà (menthol) không dùng cho trẻ em dưới 3 tuổi.

- Cũng như nước muối sinh lý, dung dịch xịt vệ sinh mũi nước biển sâu XI-FRESH an toàn nên có thể yên tâm sử dụng thường xuyên hàng ngày trong thời gian dài.

#### Cảnh báo và thận trọng

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

- Không được uống.

#### Trình bày và bảo quản

- Hộp 1 chai xịt phun sương 80 ml, 100 ml.

- Bảo quản ở nhiệt độ thường, tránh ánh sáng. ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM.

- Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Sản xuất và chịu trách nhiệm về sản phẩm

**Công ty Cổ phần Dược Danapha**

253 Dũng Sĩ Thanh Khê, P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: 0236.3760126

Fax: 0236.3760127



**TS. Lê Thăng Bình**