

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT

Số 09, Đường Lam Sơn, Phường 05, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

- 1. Tên thiết bị:** Máy hút nước bọt
- 2. Chứng loại:** Theo danh sách đính kèm
- 3. Hãng, nước sản xuất:** Dürr Dental SE / Đức
- 4. Hãng, nước chủ sở hữu:** Dürr Dental SE / Đức
- 5. Mục đích sử dụng:** Dùng trong nha khoa – Tạo lực hút hỗ trợ loại bỏ dung dịch: chất rắn, hóa chất, bọt máu...trong khoang miệng ra ngoài.
- 6. Chống chỉ định (Nếu có):** Người không có chuyên môn nha khoa hoặc không là kỹ thuật viên nha khoa chuyên nghiệp không được phép sử dụng máy.
- 7. Hướng dẫn sử dụng:**
 - Bước 1:** Thực hiện thao tác lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống hút nước bọt nha khoa vào hệ thống ghế nha khoa.
 - Bước 2:** Nhấc dụng cụ hút nước bọt trên ghế nha khoa để kích hoạt hệ thống hút.
 - Bước 3:** Mở van khóa trên đầu dụng cụ hút để thực hiện thao tác cho bệnh nhân.
 - Bước 4:** Khóa van trên đầu dụng cụ hút nước bọt mỗi khi lấy ra khỏi khoang miệng và đặt dụng cụ lại vị trí ban đầu. Lặp lại thao tác cho đến khi kết thúc buổi điều trị.
- 8. Cảnh báo và thận trọng:**
 - Đọc tài liệu hướng dẫn sử dụng trước khi vận hành máy.
 - Tuân thủ các nguyên tắc trong tài liệu Lắp đặt và vận hành.
 - Không dùng máy để hút chất dễ cháy hoặc hỗn hợp thuốc nổ.
 - Không dùng máy như máy hút vệ sinh thông thường.
 - Không dùng hóa chất chứa clo, chất tạo bọt, acetone.
 - Không dùng máy tại khu vực dễ cháy nổ.
 - Không vận hành máy nếu máy chưa được lắp màng lọc.
 - Kiểm tra tình trạng của máy trước khi sử dụng điều trị.
 - Thay phích cắm hoặc dây cáp điện nếu bị hư hỏng, đứt, rò rỉ.
 - Khuyến cáo sử dụng bộ phận, phụ kiện hay thế chính hãng hoặc được nhà sản xuất phê duyệt, đặc biệt là cáp nguồn.

- Tuân thủ các nguyên tắc an toàn về điện và sử dụng điện, đảm bảo nguồn điện cấp cho máy đúng chuẩn. Bảo vệ kết nối của phích cắm điện trong suốt quá trình vận hành máy.
- Không chạm vào bệnh nhân trên ghế nha khoa khi đang chạm hoặc cầm phích cắm điện, giữ khoảng cách an toàn.
- Đảm bảo chiều dài và độ lớn của dây cáp phải đúng chuẩn tránh ảnh hưởng đến khả năng cung cấp nguồn điện cho máy.
- Đảm bảo đủ khe hở, khoảng cách tối thiểu 30cm từ máy đến các thiết bị khác để thoát nhiệt làm mát máy, tránh che đậy.
- Vệ sinh khử khuẩn bộ phận hút trước khi sử dụng.
- Vệ sinh bề mặt máy bằng dung dịch vệ sinh phù hợp.
- Xử lý chất thải theo quy định của địa phương, trước khi vứt bỏ máy, phải xả khí nén từ bình tích áp.
- Thông báo ngay cho nhà sản xuất nếu có bất kỳ sự cố nghiêm trọng xảy ra liên quan đến máy.
- Tuân thủ lịch bảo trì máy.

9. Tác dụng bất lợi có thể xảy ra: Máy có thể cháy nổ, gây tổn hại đến con người nếu không tuân thủ hướng dẫn lắp đặt và sử dụng của nhà sản xuất.

10. Điều kiện bảo quản: Bảo quản ở nhiệt độ phòng khô thoáng, thông gió đầy đủ, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có độ ẩm cao.

ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU