

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ ĐÈN ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN CÓ CAMERA VÀ PHỤ KIỆN

MODEL: insight iS3; insight iS3-L; insight iS3-R; insight iS3-F; insight iS3-C



Chú ý khi sử dụng:

1. Sản phẩm này không được sử dụng gần khu vực có lửa
2. Sản phẩm đã được kiểm tra đánh giá tương thích điện từ
3. Sản phẩm này chứa nhiều bộ phận đặc biệt vì vậy không nên tháo rời các thiết bị
4. Khi sử dụng sản phẩm này, không nên tác động lực quá mạnh
5. Vì sản phẩm không có chức năng chống nước nên cẩn thận khi sử dụng sản phẩm trong môi trường nước
6. Sạc pin trước khi sử dụng lần đầu tiên
7. Màn hình nên tắt trước khi thay pin
8. Chú ý tình trạng pin của thiết bị trước khi sử dụng

Hướng dẫn sử dụng:

1. Giữ màn hình với một tay và tay khác với cán đèn sau đó lắp vào nhau, khi nghe âm thanh “click” nghĩa là nó đã được kết nối thành công
2. Sau khi kết nối màn hình với cán đèn thành công, bấm và giữ nút bấm ở sau màn hình trong 1s để mở máy
3. Màn hình sẽ mở ngay lập tức sau khi mở nút nguồn
4. Tay cầm của đèn có thể lắp với 4 loại lưới khác nhau của lưới đèn gồm size SS, size S, size M và size L
5. Chọn lưới đèn phù hợp với bệnh nhân và lắp lưới đèn vào tay cầm đèn khi nghe âm thanh “click”, thiết bị đã sẵn sàng để sử dụng
6. Dùng cây dẫn để lắp ống nội khí quản và để phía bên phải của lưới đèn khi đặt nội khí quản
7. Chức năng chụp hình: Ấn nút camera phía dưới bên trái của màn hình
8. Chức năng quay phim, thu âm thanh: Bấm giữ 2 giây nút camera phía góc trái màn hình, khi nút camera trở thành màu đỏ, nghĩa là đèn đang thực hiện chức năng qua phim, thu âm thanh. Kết thúc quá trình quay phim: Bấm nút camera màu đỏ ở phía góc trái màn hình
9. Tình trạng pin: Màu xanh dương - đang sạc; màu xanh lá cây - đầy pin; màu vàng - pin dưới 50% và màu đỏ - pin dưới 20% do đó phải đi sạc ngay lập tức
10. Sạc pin: Sạc pin với nguồn điện 220V và 50 Hz bằng cục sạc pin kèm theo máy

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ ĐÈN ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN CÓ CAMERA VÀ PHỤ KIỆN

MODEL: insight iS3; insight iS3-L; insight iS3-R; insight iS3-F; insight iS3-C



Làm sạch và tiệt trùng

Màn hình:

1. Tắt màn hình bằng cách bấm giữ nút phía sau màn hình trong 2 giây
2. Tháo màn hình và tay cầm
3. Dùng khăn hoặc vải mềm với 70% isopropyl alcohol để lau màn hình từ trên xuống dưới nhưng tránh điểm nối của pin ở phía dưới
4. Lau hai lần và để khô ở nhiệt độ phòng
5. Bảo quản thiết bị trong điều kiện sạch, khô ráo, tránh nhiễm trùng chéo

Tay cầm:

1. Sau khi sử dụng, ngắt kết nối màn hình và tay cầm
2. Bỏ lưới đèn
3. Kéo thanh camera của lưới đèn tới kích thước theo chiều dài của lưới người lớn
4. Dùng khăn mềm với chất tẩy rửa enzyme để lau
5. Lau nó với nước trong hai lần và để khô ở nhiệt độ phòng
6. Bảo quản trong môi trường sạch, khô, tránh nhiễm trùng chéo
7. Khuyến nghị sử dụng hấp Ethylene oxide (ETO) hoặc hấp Plasma nhiệt độ thấp để tiệt trùng tay cầm