



HQ MEDICAL ., JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG QUÂN

Mã số thuế: 0106140448

Địa chỉ: Số 185 phố Kim Hoa, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
Điện thoại: 043 572 1040 / 0912 85 1386 / 0975 386 368 Fax: 043 572 1040
Email: thietbityehoangquan@gmail.com / info@thietbityehoangquan.com
Website: thietbityehoangquan.com

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế:

Công ty cổ phần thiết bị y tế Hoàng Quân

Số 185 phố Kim Hoa, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội

Tên vật tư y tế tiêu hao: **Ống lấy máu xét nghiệm Sodium Citrat 3,8% (1:9)**

Quy định chung:

- Trước khi lấy máu, bệnh nhân nhịn ăn, không uống nước.
- Lấy máu vào buổi sáng sau khi ngủ dậy (trừ khi có chỉ định cấp cứu).
- Ống nghiệm đựng máu có chứa Sodium Citrat 3,8% (1:9), phải ghi rõ họ tên, tuổi của bệnh nhân.
- Khi lấy máu phải tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật để tránh vỡ hồng cầu: bơm tiêm khô, kim tiêm to, hút nhẹ, tháo kim tiêm, bơm nhẹ nhàng vào thành ống nghiệm.
- Lấy máu xong phải lắc nhẹ ống nghiệm trong 3 – 5 phút, sau đó gửi đến phòng xét nghiệm.

Hà nội, ngày 15 tháng 09 năm 2017
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY



GIAM ĐỐC
Hoàng Thị Ngọc