



HQ MEDICAL ,, JSC

## CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG QUÂN

Mã số thuế: 0106140448

Địa chỉ: Số 185 phố Kim Hoa, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại: 043 572 1040 / 0912 85 1386 / 0975 386 368 Fax: 043 572 1040

Email: thietbiytehoangquan@gmail.com / info@thietbiytehoangquan.com

Website: thietbiytehoangquan.com

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế:

**Công ty cổ phần thiết bị y tế Hoàng Quân**

Số 185 phố Kim Hoa, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội

Tên vật tư y tế tiêu hao: **Lam kính 7105**

### Quy trình kỹ thuật:

- Chuẩn bị dụng cụ, hoá chất, bệnh phẩm.
- Đánh dấu tiêu bản.
- Lấy một ít bệnh phẩm lên lam kính tùy theo từng xét nghiệm cụ thể.
- Nhỏ 1- 2 giọt hoá chất soi tươi lên tiêu bản.
- Đậy lamén.
- Đối với dung dịch KOH thì chờ 15- 30 phút, nếu muốn quan sát ngay thì hơi nóng trên ngọn lửa đèn cồn.
- Soi kính hiển vi vật kính 10x và 40x.
- Ghi kết quả vào phiếu XN.
- Xử lý dụng cụ, bệnh phẩm.

Hà nội, ngày 15 tháng 09 năm 2017  
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY



GIÁM ĐỐC

*Hoàng Thị Ngọc*