

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên sản phẩm: **Dung dịch xịt mũi (ACTIVE SPRAY for Babies)**

### 1. THÀNH PHẦN

Muối tinh khiết (Natri chloride) 0.9%, Tinh dầu khuynh diệp 0.003%, Nano bạc 15ppm, Phụ gia, nước tinh khiết vừa đủ.

### 2. CÔNG DỤNG

- Giúp làm sạch, loại bỏ các tác nhân gây kích ứng mũi như: bụi, phấn hoa và các chất bẩn khác, giúp giữ sạch và thông thoáng đường hô hấp, giúp dễ thở và cảm giác dễ chịu.
- Hỗ trợ phòng ngừa các triệu chứng viêm nhiễm đường hô hấp như nghẹt mũi, sổ mũi, viêm mũi, viêm xoang.

### 3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

#### Cách dùng:

- Đưa nhẹ đầu vòi xịt vào từng bên mũi.
- Ấn nhẹ, dứt khoát đầu vòi xịt vào khoang mũi, xịt đủ thể tích để dung dịch kéo theo chất nhầy, bụi bẩn ra ngoài.
- Lau sạch đầu vòi sau khi sử dụng.

Xịt vệ sinh ngày 4 đến 6 lần khi đang có các bệnh lý về mũi.

Xịt ngày 2 lần để vệ sinh và hỗ trợ phòng ngừa các bệnh về mũi.

#### Đối tượng sử dụng:

Sản phẩm phù hợp cho trẻ em trên 3 tháng tuổi.

### 4. CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Dị ứng với bất kỳ thành phần nào của dung dịch.

### 5. CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG

Không sử dụng các dung dịch khác để thay thế khi dung dịch vệ sinh mũi trong chai hết.

### 6. BẢO QUẢN:

Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

### 7. HẠN SỬ DỤNG

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Hà Nội, Ngày 25 tháng 05 năm 2022

**Người đại hiện hợp pháp của cơ sở**



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Đức Hải*