

Hải Dương, ngày 20 tháng 07 năm 2022

GEL BÔI NGOÀI DA

Chủng loại/Mã sản phẩm: SLIVER CARE/01

1.1 Thành phần:

Aqua, Ethanol, Carbomer, Nano Bạc, Dipropylene Glycol, Houttuynia Cordata Extract (Chiết xuất Diệp Cá), Eclipta Prostrata Extract (Chiết Xuất Cỏ Mực), Polygonum Multiflorum Root Extract (Chiết xuất Rễ Hà Thủ Ô Đỏ), Phyllostachys Nigra Leaf Extract (Chiết xuất Lá Tre), Urtica Dioica (Nettle) Extract (Chiết xuất Cây Tầm Ma), Passiflora Incarnata Extract (Chiết xuất Lạc Tiên Hoa Tía), Centella Asiatica Extract (Chiết xuất Rau Má), Piper betle Extract (Chiết xuất Trà Không), Lonicera japonica Extract (Chiết xuất Kim Ngân Hoa), Phellodendron amurense Extract (Chiết xuất Hoàng Bá), Glycerin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Phenoxyethanol, Triethanolamine.

1.2 Mục đích sử dụng:

Dùng để làm sạch, sát khuẩn, ngăn ngừa viêm niêm mạc miệng, da trong các trường hợp viêm da, lở loét, mụn nước, viêm niêm mạc miệng, gây ra do nhiễm virus tay chân miệng, virus thủy đậu (phồng da), herpes, zona, sởi.
- Sử dụng làm sạch và sát khuẩn da, giúp tái tạo da, ngăn ngừa hình thành sẹo trong trường hợp bỏng nhẹ, vết côn trùng cắn, muỗi đốt

1.3 Cách dùng:

- Bước 1: Vệ sinh sạch vùng cần bôi, lau khô
- Bước 2: Mở nắp tube, lấy 1 lượng vừa đủ thoa đều lên vị trí cần bôi
- Bước 3: Đóng nắp tube lại

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

Người lớn và trẻ em bị các bệnh ngoài da như viêm da, lở loét, mụn nước, chân tay miệng, thủy đậu, herpes, zona.....

Chống chỉ định:

- Người dùng quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần của sản phẩm.

Lưu ý: Để xa tầm tay trẻ em

Bảo quản:

Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

Để xa tầm tay trẻ nhỏ.

1.7 Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Sản phẩm của: CÔNG TY TNHH MEDIZIN

Địa chỉ: Số 1, Ngõ 368, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình, Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

