




Hướng dẫn sử dụng máy trợ thở


1. Chức năng nút

 **Nút Ramp:** Nhấn vào nó để bật tính năng Ramp.

 **Nút tắt tiếng:** Nhấn vào nút này để tắt âm báo.

 **Núm:** Bắt đầu điều trị và điều chỉnh cài đặt thiết bị.

2. Thiết lập thiết bị

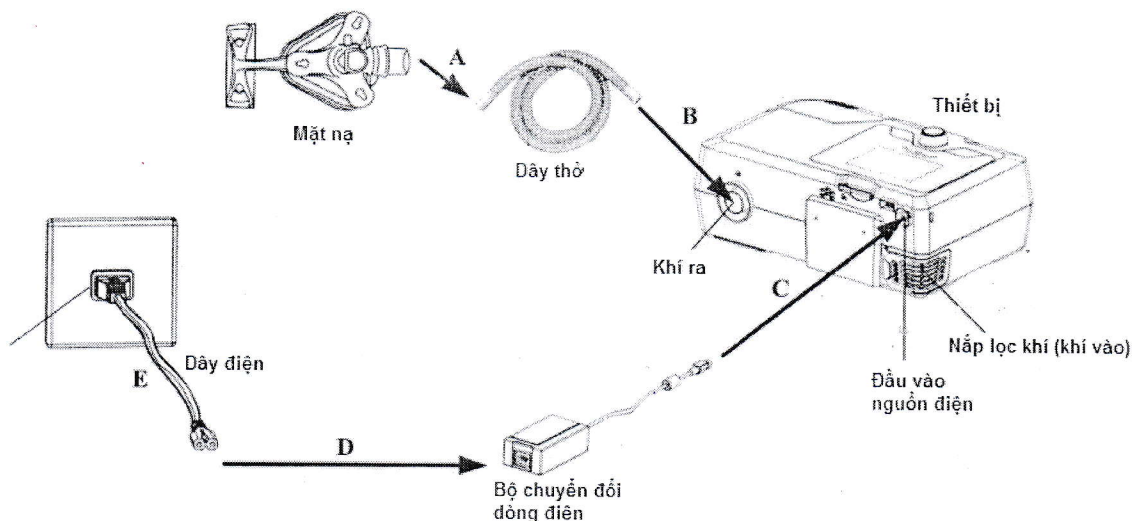

A. Nối một đầu của ống với mặt nạ đã lắp ráp.

B. Nối chặt đầu kia của ống với lỗ thoát khí của thiết bị, như trong hình trên.

C. Kết nối bộ đổi nguồn với đầu vào DC của thiết bị chính.


D. Nối dây nguồn với bộ đổi nguồn.

E. Cắm dây nguồn vào ổ điện.

3. Điều chỉnh cài đặt thiết bị

A. Sau khi thiết bị được kết nối với nguồn điện, màn hình của thiết bị sẽ hiển thị Giao diện chính được hiển thị trong hình đầu tiên bên dưới, hoặc Giao diện chính được hiển thị trong hình thứ hai bên dưới, hoặc Giao diện chính được hiển thị trong hình thứ ba bên dưới hoặc Giao diện chính được hiển thị trong hình thứ tư dưới đây.


Lưu ý: Chỉ có thể nhìn thấy giá trị độ bão hòa oxy trong máu (SpO2) và nhịp mạch sau khi Bộ SpO2 được kết nối chính xác với thiết bị chính.

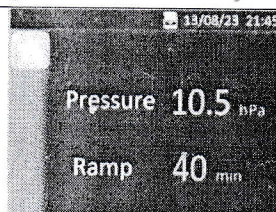


Giao diện trên chỉ áp dụng cho G2S B20S, G2S B20A.



Giao diện trên chỉ áp dụng cho G2S B20T.

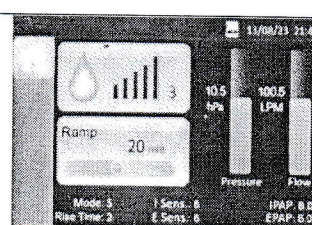


Chỉ giao diện trên áp dụng cho G2S B25A, G2S B25S.

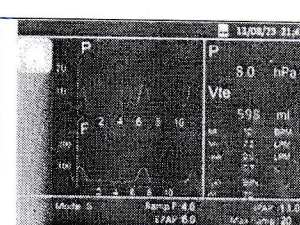


Chỉ giao diện trên áp dụng cho G2S B25T, G2S LAB.


B. Từ Giao diện chính hiển thị ở trên, nhấn và giữ **Nút Ramp** trong ba giây. Màn hình hiển thị giao diện Thiết lập ban đầu, như trong hình bên dưới.

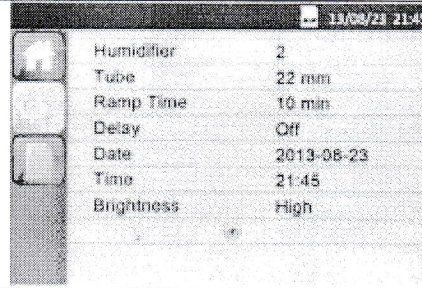


C. Nhấn **Nút** để truy cập giao diện Cài đặt, như thể hiện trong hình bên dưới.

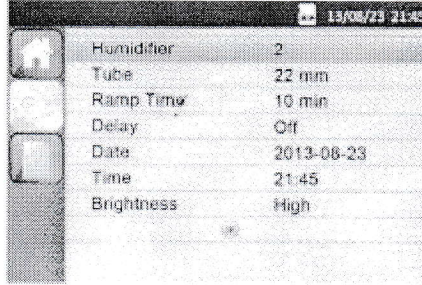


D. Nhấn và xoay **Nút** để điều chỉnh một tùy chọn.

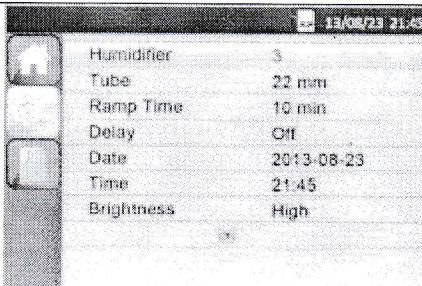

E. Nhấn **Nút** để xác nhận khả năng điều chỉnh của bạn với tùy chọn.

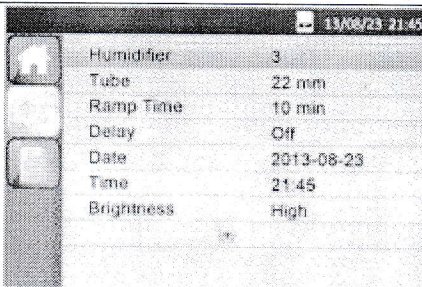

F. Con trỏ chuyển đổi giữa các tùy chọn khi bạn xoay **Nút**. Tham khảo các bước C-E để điều chỉnh các tùy chọn khác. Khi con trỏ ở trên tùy chọn Trang chủ, như thể hiện trong hình bên dưới, hãy nhấn **Nút**. Để thoát Giao diện cài đặt

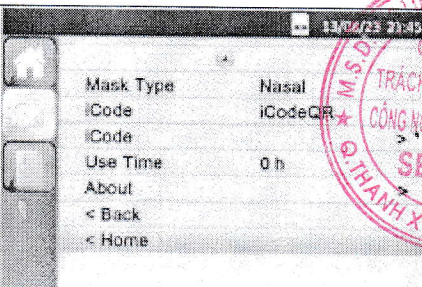

4. Bắt đầu điều trị

Sau khi bạn hoàn tất việc điều chỉnh cài đặt thiết bị và quay lại Giao diện chính, hãy nhấn **Nút** để bắt đầu điều trị.