

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Blossom Găng tay phẫu thuật tiệt trùng có bột



Mô tả:

Găng tay phẫu thuật cao su, dạng có bột, vô trùng

Vật liệu: Cao su thiên nhiên

Màu sắc: Tự nhiên đến trắng và đồng nhất cho phép thay đổi dần dần do sự thay đổi độ dày

Hàm lượng đạm: ít hơn 200 μ g / dm²

Hàm lượng bột: ít hơn 15mg / dm²

Có các size: 6; 6.5; 7; 7.5; 8; 8.5; 9

Chỉ định sử dụng:

Găng tay được thiết kế để đeo vào tay của nhân viên y tế trong quá trình kiểm tra y tế như một thủ tục giúp bảo vệ sự lây nhiễm chéo giữa nhân viên y tế và bệnh nhân.

Hướng dẫn sử dụng:

* Đeo găng tay:

- Găng tay sử dụng 1 lần.
- Mở bao bì sản phẩm, lấy găng tay ra
- Cầm viền cổ găng tay sau đó từ từ đưa vào găng tay
- Lấy một chiếc găng tay khác ra và lặp lại các thao tác cho tay còn lại

* Tháo găng tay:

- Nắm viền cổ găng tay từ từ lộn ngược găng và tháo khỏi tay. Lưu ý tránh để tay tiếp xúc với da của tay còn lại
- Làm thao tác tương tự với tay còn lại
- Sau khi hoàn tất tháo bỏ găng tay, cầm xử lý như chất thải y tế

Thận trọng: Sản phẩm này có chứa mù cao su tự nhiên và các thành phần khác có thể gây phản ứng dị ứng bao gồm phản ứng phản vệ. Trường hợp riêng biệt của các phản ứng như vậy với mù hoặc bột cao su tự nhiên đã được báo cáo. Sau sử dụng, người dùng nên kiểm tra bằng mắt thường găng tay và loại bỏ bất kỳ chất nhiễm bẩn nào từ bề mặt bên ngoài trước khi tháo găng tay từ bàn tay. Ngoài ra, cần thận bóc găng tay ra khỏi tay để găng tay bên ngoài bị nhiễm bẩn không chạm vào da của bạn.

Cảnh báo: Không sử dụng sản phẩm này nếu bạn đã từng bị dị ứng với các chất phụ gia hóa học.

Nếu bạn gặp phản ứng dị ứng với sản phẩm này, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức và hỏi ý kiến bác sĩ.

Sau khi mặc quần áo, có thể loại bỏ bột bằng cách lau kỹ găng tay bằng miếng bọt biển ướt vô trùng, khăn ướt vô trùng hoặc các phương pháp hiệu quả khác.

Bảo quản:

Lưu trữ ở nơi khô thoáng.