

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DUNG DỊCH XỊT MŨI HỌNG (Chủng loại/ Mã sản phẩm: OSUVIN SPRAY/ 01)

1. Thành phần:

Benzalkonium Chloride, Sodium Hyaluronate, Natri Chloride, D- Pathenol, Menthol, Tinh dầu khuynh diệp, Cu 2+, Zn 2+, Nước tinh khiết.

2. Mục đích sử dụng :

Giúp làm sạch, vệ sinh mũi họng, loại bỏ chất nhầy, bụi bẩn, tạo cảm giác thông thoáng, đảm bảo độ ẩm tự nhiên cho niêm mạc mũi.

Hỗ trợ ngừa khuẩn, kháng viêm, hỗ trợ giảm các triệu chứng về mũi, họng trong các trường hợp viêm xoang, ngạt mũi, sổ mũi, viêm hầu họng, đau rát họng do nhiễm khuẩn hoặc do các tác nhân dị ứng gây nên.

3. Cách dùng:

+ Mở nắp sản phẩm ấn vòi xịt ra ngoài đến khi dung dịch xịt ra khỏi vòi tạo thành sương đều

+ Ấn nhanh và dứt khoát 2- 3 nhíp xịt mỗi lần vào mỗi bên mũi.

Trường hợp viêm xoang, viêm mũi họng do nhiễm khuẩn, dị ứng: Xịt ngày 4-6 lần.

Vệ sinh mũi hàng ngày: Xịt ngày 3- 4 lần.

+ Đậy nắp sản phẩm.

Đối tượng sử dụng:

- Dùng cho trẻ em, người lớn, phụ nữ có thai và cho con bú.

Chống chỉ định :

- Người mẫn cảm với bất kì thành phần nào của sản phẩm.

-Bảo quản:

- Để xa tầm tay trẻ em

- Để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ không quá 30°C.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Sản phẩm của: CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM VIỆT Ý

Địa chỉ: Lô B3, KCN Nguyễn Đức Cảnh, đường Trần Thủ Độ, Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình.

Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM VIỆT Ý
Địa chỉ: Lô B3, KCN Nguyễn Đức Cảnh, đường Trần Thủ Độ, Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ SỞ



GIÁM ĐỐC
Vũ Duy Công