


**HƯỚNG DẪN KHỬ KHUẨN, TIỆT TRÙNG DỤNG CỤ KHÁM CHỮA BỆNH -  
DỤNG CỤ CHỊU NHIỆT**

(sơ lược theo quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 28/8/2017 của Bộ Y tế)

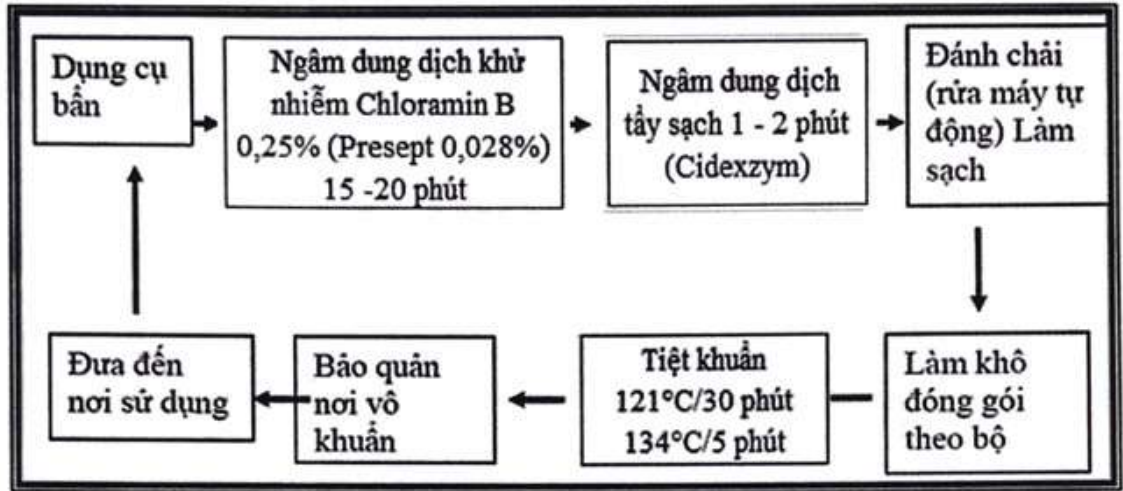

**Các bước thực hiện**

TT	Nội dung
<b>1. Khử nhiễm</b>	
	- Dụng cụ y tế Panh kim kéo bằng thép không gỉ đa phần là những dụng cụ chịu nhiệt. Nhân viên y tế sau khi sử dụng dụng cụ ngâm ngay vào dung dịch Chloramin 0,5% hoặc Cidex (glutaraldehyd 2%) đựng trong xô chứa dụng cụ khoảng 10 lít.
	- Cho dụng cụ ngập hoàn toàn trong dung dịch.
	- Thời gian ngâm trong 10 phút
<b>2. Làm sạch</b>	
	- Rửa các dụng cụ bằng xà phòng và nước sạch
	- Tháo rời các dụng cụ (nếu có thể). Làm sạch các khớp nối ở dụng cụ
	- Dùng bàn chải cọ rửa sạch các dụng cụ
	- Tráng bằng nước sạch, lau khô hoặc để khô tự nhiên
<b>3. Khử khuẩn bằng hấp ướt hoặc sấy khô</b>	
<b>3.1. Hấp ướt</b>	
	- Gói dụng cụ bằng vải sạch
	- Xếp rời nhau trong nồi hấp
	- Duy trì ở 121°C trong 30 phút với gói dụng cụ có bọc và 20 phút với dụng cụ không bọc.
	- Cất dụng cụ trong hộp vô khuẩn có nắp đậy hoặc túi vô khuẩn có nhãn ghi hạn



	dùng.
<b>3.2. Sấy khô</b>	
	- Dụng cụ sau khi rửa sạch, lau khô cho vào hộp có nắp, từng bộ riêng
	- Thời gian và nhiệt độ chuẩn: <ul style="list-style-type: none"> <li>● 121°C trong vòng 20-30 phút</li> <li>● 134°C trong vòng 5 phút</li> </ul>
	- Cát dụng cụ trong hộp vô khuẩn có nắp đậy hoặc túi vô khuẩn có nhãn ghi hạn dùng.

**Lưu ý:**

- Nếu cơ sở sử dụng Cidex OPA, đây là loại dung dịch không được pha loãng, mà sử dụng nguyên chất để ngâm dụng cụ. Dung dịch được tái sử dụng trong 14 ngày, do đó, cần ghi lại ngày đầu tiên sử dụng. Chai (bình) Cidex OPA đã khai ra chỉ được sử dụng tối đa 75 ngày.
- Việc đóng gói dụng cụ: nếu các dụng cụ sử dụng theo bộ thì đóng chung 1 gói, đối với dụng cụ sử dụng đơn lẻ thì đóng mỗi gói 1 dụng cụ (KHÔNG được đóng gói chung, mỗi lần dùng lấy ra 1 món), kể cả mũi khoan cũng phải đóng gói riêng từng mũi.
- Cần trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cho nhân viên làm công tác xử lý dụng cụ: găng tay dày và dài, nón, khẩu trang, mắt kính, tạp dề.
- Không ngâm dụng cụ quá lâu hơn mức cần thiết trong dung dịch tiệt trùng. Sau khi tiệt trùng, nên rửa lại bằng nước ấm để loại bỏ tất cả các vết tích của hóa chất để ngăn dụng cụ bị phai màu hoặc mòn
- Phải chú ý đặc biệt đến các dụng cụ vi phẫu vì các đầu dụng cụ có thể dễ dàng bị hỏng khi tiếp xúc với các dụng cụ khác



GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Loanh Sang*