



CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TAM CHÂU

48 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, Tp.HCM
ĐT : (028) 38625728 Email : ytetamchau@gmail.com

Tp.HCM, ngày 16 tháng 08 năm 2022

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ Băng keo cá nhân – Chủng loại: SOGIBAND

- **MÔ TẢ** : Băng cá nhân làm bằng nhựa Polyethylene hoặc vải co giãn. Chất keo acrylic không bột, độ dính tốt và không gây kích ứng da. Chất keo bao quanh gạc hút giúp cách ly bụi bẩn và vi trùng. Phần gạc Rayon, PET có lớp màng trên cùng với độ thấm hút cao sẽ không dính vào vết thương.
- **CHỈ ĐỊNH** Dùng để băng các vết cắt, vết thương hoặc trầy xước nhỏ.
- **HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG** : Làm vệ sinh da và lau khô trước khi dán băng. Dán băng sao cho lớp gạc ở giữa che phủ hoàn toàn vết thương. Thay băng hằng ngày.
- **CHỐNG CHỈ ĐỊNH** : Chưa được biết.
- **CẢNH BÁO**: Sản phẩm đã được tiệt trùng. Không được tiệt trùng lại. Không tái sử dụng. Nếu bị dị ứng hoặc tiếp tục chảy máu hãy ngừng sử dụng và đi khám bác sỹ.
- **BẢO QUẢN**: từ 15⁰C-30⁰C, nơi khô ráo, tránh nhiệt trực tiếp.

Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Tam Châu

Giám Đốc



Trần Phan Sơn Giang