



# CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TAM CHÂU

48 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, Tp.HCM  
ĐT : (028) 38625728 Email : [ytetamchau@gmail.com](mailto:ytetamchau@gmail.com)

Tp.HCM, ngày 16 tháng 08 năm 2022

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

### Băng gạc tiệt trùng – Chủng loại: SOGIDRESSING

- **MÔ TẢ :**
  - Gạc nền bằng vải không dệt mềm mỏng, co giãn mang lại cảm giác thông thoáng, chất keo ít dị ứng.
  - Gạc thấm hút tốt, không gây dính vết thương.
  - Mỗi miếng được đựng trong bao riêng tiệt trùng.Băng với các kích cỡ khác nhau, được đóng gói tiệt trùng. Bảo quản nhiệt độ từ 15<sup>0</sup>C-30<sup>0</sup>C, nơi khô ráo, tránh nhiệt trực tiếp
- **CHỈ ĐỊNH:** Dùng để băng các vết thương từ vừa đến lớn, nhất là chăm sóc vết thương sau phẫu thuật.
- **HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :** Làm vệ sinh da và lau khô trước khi dán băng, dán băng sao cho lớp gạc ở giữa che phủ hoàn toàn vết thương. Thay băng khi cần thiết hoặc khi miếng băng lỏng ra.
- **CHỐNG CHỈ ĐỊNH :** Chưa được biết.
- **CẢNH BÁO:** Sản phẩm đã được tiệt trùng. Không được tiệt trùng lại. Không tái sử dụng. Không được sử dụng nếu bao gói đã bị mở hoặc hư hỏng. Không được sử dụng trên vết thương bị nhiễm trùng.
- **BẢO QUẢN:** từ 15<sup>0</sup>C-30<sup>0</sup>C, nơi khô ráo, tránh nhiệt trực tiếp.

Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Tam Châu

Giám Đốc  
  
Trần Phan Sơn Giang