



CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TAM CHÂU

48 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, Tp.HCM
ĐT : (028) 38625728 Email : ytetamchau@gmail.com

Tp.HCM, ngày 16 tháng 08 năm 2022

MẪU NHÃN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ Băng gạc tiết trùng – Chủng loại: SOGIDRESSING

SOGIDRESSING	Băng gạc tiết trùng
KÍCH THƯỚC:	QUY CÁCH : Số lưu hành TTYT:.....
MÔ TẢ :	
<ul style="list-style-type: none">○ Nền băng vải không dệt, co giãn; Chất keo ít dị ứng.○ Gạc thấm hút tốt, không gây dính vết thương.○ Mỗi miếng được đựng trong bao riêng tiết trùng.	
CHỈ ĐỊNH: Dùng để băng các vết thương từ vừa đến lớn, nhất là chăm sóc vết thương sau phẫu thuật.	
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG : Làm vệ sinh da và lau khô trước khi dán băng, dán băng sao cho lớp gạc ở giữa che phủ hoàn toàn vết thương. Thay băng khi cần thiết hoặc khi miếng băng lỏng ra.	
CHỐNG CHỈ ĐỊNH : Chưa được biết.	
CẢNH BÁO: Sản phẩm đã được tiết trùng. Không được tiết trùng lại. Không tái sử dụng. Không được sử dụng trên vết thương bị nhiễm trùng.	
BẢO QUẢN: từ 15°C-30°C, nơi khô ráo, tránh nhiệt trực tiếp.	Số lô và hạn dùng : xem trên bao bì
Nhà sản xuất : Tronjen Medical Technology Inc.	Xuất xứ: Đài Loan
Chủ sở hữu số lưu hành: Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Tam Châu	
Địa chỉ : 48 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, Tp.HCM	
ĐT : (028) 38625728	Email : ytetamchau@gmail.com Website : http://www.ytetamchau.com

Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Tam Châu

Giám Đốc



Trần Phan Sơn Giang