



# CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TAM CHÂU

48 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, Tp.HCM  
ĐT : (028) 38625728 Email : [ytetamchau@gmail.com](mailto:ytetamchau@gmail.com)

Tp.HCM, ngày 16 tháng 08 năm 2022

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ Băng keo lụa – Chủng loại: SOGISYVAL

- **MÔ TẢ :**
  - o Băng keo lụa cellulose acetate cao cấp , mềm mại, dễ xé ngang, dọc, thông thoáng tốt.
  - o Chất keo ít dị ứng, thích hợp cho da nhạy cảm.
  - o Không hoặc có lõi nhựa chắn chắn, tiện lợi khi sử dụng.
  - o Băng với các kích cỡ khác nhau.
- **CHỈ ĐỊNH:** Sử dụng để băng cố định bông gạc, ống thông, y dụng cụ.
- **HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :** Làm vệ sinh da và lau khô trước khi dán băng. Cắt đoạn thích hợp rồi dán trực tiếp lên vị trí cần cố định của bông gạc, ống thông, y dụng cụ. Miết nhẹ nhàng để băng keo dính chặt. Không nên căng và kéo dẫn băng khi dán.
- **CHỐNG CHỈ ĐỊNH :** Chưa được biết.
- **CẢNH BÁO:** Không tái sử dụng. Không sử dụng trực tiếp trên vết thương.
- **BẢO QUẢN:** từ 15<sup>0</sup>C-30<sup>0</sup>C, nơi khô ráo, tránh nhiệt trực tiếp.

Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Tam Châu

Giám Đốc



Trần Phan Sơn Giang