

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ NONG THẬN

Model: KP-18F

I. Hướng dẫn sử dụng

1. Chèn kim vào thận và xác minh vị trí bằng cách quan sát nước tiểu trở lại.
 2. Rút kim bên trong ra khỏi dẫn dịch và đưa đầu mềm của dây dẫn hướng qua kim dẫn hướng vào thận. Nâng dây dẫn hướng đến độ sâu cần thiết trong khi vẫn để đủ dây dẫn hướng bên ngoài thân máy.
- Cảnh báo: Không tiến hoặc rút dây dẫn hướng chống lại điện trở. Xác định nguyên nhân cản trở trước khi tiến hành.
3. Trong khi giữ giầy hướng tại chỗ, từ từ rút kim giới thiệu bằng cách luồn ngược dây hướng.
 4. Luồn chỏ làm giãn qua dây dẫn hướng.
 5. Tiến triển làm giãn đường bằng thuốc dẫn 8F, 10F, 14F, 16F, 18F, 20F, 22F.
 6. Tiến độ nong bằng chuyển động xoắn qua dây dẫn hướng vào thận. Sử dụng phương pháp soi bàng quang hoặc siêu âm để xác nhận vị trí.
 7. Tháo bộ giãn bên trong và dây dẫn hướng cùng nhau.
- Cần phải hiểu rõ về các nguyên tắc kỹ thuật, ứng dụng lâm sàng và rủi ro liên quan đến phẫu thuật cắt thận qua da trước khi sử dụng sản phẩm này. Các khuyến nghị được đưa ra chỉ nhằm mục đích hướng dẫn cơ bản để sử dụng bộ tài liệu này. Việc thực hiện phẫu thuật cắt thận qua da không nên được thực hiện nếu không có kiến thức toàn diện về các chỉ định, kỹ thuật và rủi ro của thủ thuật.



II. Cảnh báo và thận trọng


1. Sản phẩm này chỉ dành cho các bác sĩ tiết niệu có trình độ.
2. Trước khi sử dụng, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, chú ý đến số lô và ngày hết hạn sản xuất được niêm phong, và không nên sử dụng.
3. Chỉ sử dụng một lần. Không sử dụng lại, xử lý lại hoặc xác minh lại. Việc sử dụng lại, xử lý hoặc xác thực lại có thể ảnh hưởng đến tính toàn vẹn về cấu trúc của thiết bị và/ hoặc dẫn đến hỏng hóc thiết bị, do đó có thể dẫn đến thương tích, bệnh tật hoặc tử vong cho bệnh nhân. Việc tái sử dụng, tái xử lý hoặc tái chế cũng có thể tạo ra nguy cơ nhiễm bẩn thị bị và/ hoặc gây nhiễm trùng hoặc lây nhiễm chéo cho bệnh nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lây truyền các bệnh truyền nhiễm từ bệnh nhân này sang bệnh nhân khác. Nhiễm bẩn thiết bị có thể dẫn đến thương tích, bệnh tật dẫn đến tử vong.
4. KHÔNG sử dụng nếu gói bị mở hoặc bị hỏng.
5. Sản phẩm được khử trùng bằng EO và có thời hạn sử dụng là 2 năm.

6. Say khi sử dụng, vứt bỏ sản phẩm và bao bì theo quy định của bệnh viên, chính sách hành chính và/ hoặc chính quyền địa phương.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký

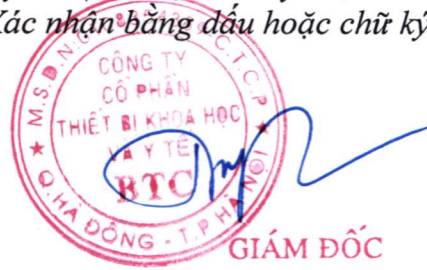

GIÁM ĐỐC

Dương Thị Huyền

