

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÂY DẪN ĐƯỜNG ĐẦU ĐEN

(Nitinol Hydrophylic Guide Wire)

Model: 0.025in x 150cm, 0.028in x 150cm, 0.032in x 150cm, 0.035in x 150cm, 0.038in x 150cm

I. Hướng dẫn sử dụng

1. Kiểm tra bao bì trước khi sử dụng. Không sử dụng nếu có bị hư hỏng hoặc bị mở.
2. Kiểm tra dây dẫn hướng xem có bị cong hoặc xoắn hay không. Không sử dụng nếu dây dẫn không hoàn chỉnh.
3. Có thể chọn một trong các cách sau:
 - a. Dưới sự giám sát của máy nội soi hoặc thiết bị phụ trợ khác, dây dẫn hướng được luồn dọc theo lỗ sinh thiết nội soi cho đến khi đến vị trí đã được định trước. Hãy cẩn thận để không làm xoắn dây dẫn hướng khi lắp vào. Giữ lại dây dẫn hướng khi sử dụng, chẳng hạn như ống thông có thể được luồn dọc theo dây dẫn hướng.
 - b. Dây dẫn hướng và ống thông được luồn dọc theo lỗ sinh thiết nội soi cho đến khi đến vị trí đã định trước dưới sự giám sát của ống nội soi hoặc thiết bị phụ trợ khác. Giữ lại dây dẫn khi sử dụng.
4. Theo quy chế bệnh viện, thống nhất tiêu hủy sau khi sử dụng.

II. Cảnh báo và thận trọng

1. Chỉ sử dụng một lần. Không sử dụng lại, xử lý lại hoặc xác minh lại.
2. Việc sử dụng thiết bị này nên được thực hiện dưới sự giám sát của các bác sĩ được đào tạo về quy trình nội soi thần kinh.
3. Sử dụng hết sức thận trọng khi sử dụng tia laser, đảm bảo tránh tiếp xúc với hướng dẫn. Tiếp xúc trực tiếp có thể gây hỏng và/ hoặc cắt đứt dây.
4. Không định hình lại hướng dây dẫn bằng bất kỳ phương tiện nào. Cố gắng việc định hình lại dây có thể gây tổn thương, dẫn đến việc giải phóng các mảnh dây vào hệ thống tiết niệu.
5. Không cố gắng sử dụng hướng dẫn nếu nó đã bị uốn cong, gấp khúc hoặc hư hỏng. Sử dụng dây bị hỏng có thể dẫn đến tổn thương lớp niêm mạc và mô liên quan, các kênh hoặc ống dẫn hoặc giải phóng các mảnh dây vào hệ tiết niệu.
6. Một thiết bị lấy, chẳng hạn như kẹp hoặc kẹp giỏ, chỉ nên được sử dụng sau khi đã rút dây hướng dẫn ra khỏi kênh hoặc ống dẫn của bệnh nhân. Sử dụng thiết bị truy xuất trong khi hướng dẫn được đặt có thể làm hỏng thiết bị.
7. Cảnh báo có thể được tìm thấy trong nhãn sản phẩm được cung cấp với mỗi thiết bị.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký



Đặng Thị Tuyên